

今日から、変わる。  
自由に動けて、  
ジブンらしく過ごせる毎日へ。

やりたいことも、行きたいところも、

制限されない。

ムーバル  
moval で、心も体も自由になれる。

スポーツや仕事、

楽しい旅行を諦めず、

新しいことにも今日から

チャレンジしよう。



どんな動きにもしっかりついてくる

さらっと快適、気分も軽く

水濡れも気にならない

## “極薄”フィルムだから実現できた 動ける自由。


従来の強く貼りつく“厚い”テープを見直し、  
しっかり固定しながらも、快適に過ごせる  
“極薄”フィルムを採用しました。

7ミクロンの極薄が生み出す「やわらかさ」と  
「ムレにくさ」で、毎日の生活をもっとアクティブに。



### 肌の凹凸に密着 × 極めて高い伸縮性


薄くてとても柔軟なフィルムだから、肌の  
凹凸に沿ってしなやかに貼りつき、面板の  
隅まで密着。さらに、体の動きに合わせて  
良く伸びて破れにくく、体の動きにしっかり  
ついてくる安心感があります。

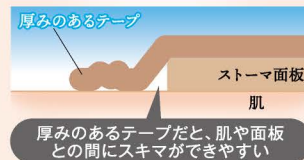

(当社比) ※イメージ図

### 汗をどんどん蒸発 × しっかり防水

高い透湿性のフィルムが汗を素早く蒸発さ  
せるから、汗がこもらずムレにくい。さらに外  
からの水をしっかり弾いて、面板への水の  
染み込みを防ぎます。運動時の汗も、その後  
の入浴も安心。

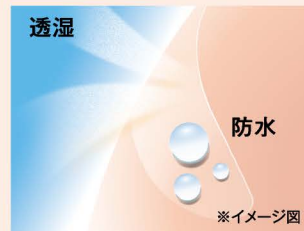

※イメージ図

## フィット感を追求した“形”で安心の自由。

2枚に分けて貼れる形にすることで、ホールド力をアップさせました。  
面板の形や装具の種類を問わず、適した固定ができて安心です。


### 面板の外周をしっかりカバー

2枚のフィルムの端がしっ  
かり重なるので、面板  
を端までしっかり覆える。




### 様々な形の面板にフィット

2枚に分けて貼るから、貼る向きや  
角度を自由に調整できる。

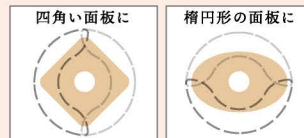

### 装具のカーブに 合わせて貼りやすい


フィルム内側のカーブが、  
装具の形状にぴったり  
合って、きれいに  
貼れる。

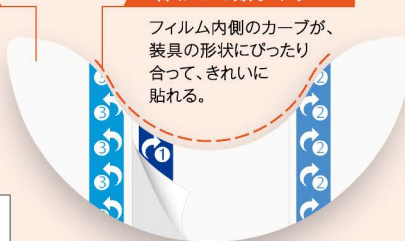

## カンタンな “手順”で、 いつでも自由に。


極薄フィルムを使ったことがなく  
ても、順番通りに使うだけでカンタンに  
貼れます。誰でもきれいに貼れるよう

3層構造 になっていて、いつでもすぐに使える工夫がいっぱいです。

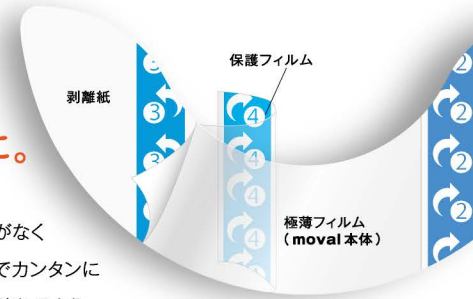

## 運動前に、忙しい朝に サッと貼れる。

① から ④ の紙と保護フィルムを、番号通りに順番にはがして貼っていくだけで  
カンタンに完成します。

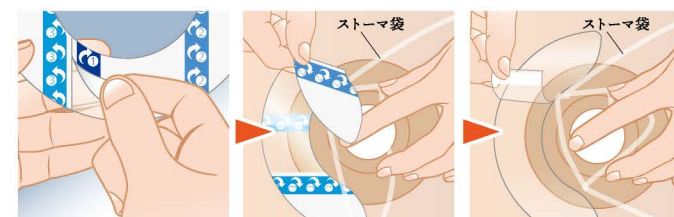


①の紙をはがして  
貼りつけます

②の紙をはがして  
貼りつけます  
(③も同様に)

④から保護フィルムをはがし  
ます  
(反対側も同様に貼りつけます)

## 器具交換時に サッととはがせる。

はがしたいときにサッととはがせるよう、フィルムの両端には、つまみやすい「タブ」付き。  
ストーマ袋で隠れて直接見づらい場所でも、タブがサッとつまめて、はがしやすく  
なっています。

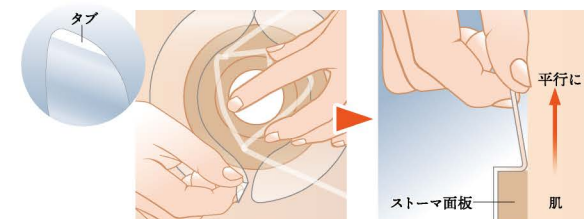

端の白いタブを持って引  
っぱります

肌にやさしくはがすため、肌と  
平行になるよう、ゆっくりはが  
します

※movalを貼る前に、面板と周辺の肌の汚れや水分をしっかり取っておきます。特に  
皮膚保護剤が付着していると、貼りつきにくくなる場合がありますので、必要に応じて  
取り除いてください。

どんな動きにも  
しっかりついてくる

- 極薄フィルムがぐんぐん伸縮し、体の様々な動きにしなやかにフィット
- ゴワつかず、肌になじんで違和感もほとんどなし  
体の動きも邪魔しない

ひねる動きが大切なゴルフや  
上下動の大きいランニングに



汗をかいても  
さらっと快適で  
気分も軽く

- 汗にもムレにくくベタベタの不快感から解放
- 汗をかいてもフィルムが浮きにくくはがれる不安が少ない

よく汗をかくスポーツや  
屋外での仕事・農作業に

※イメージ図  
(実寸大)



スポーツ後の  
シャワーも温泉も  
気にせず入れる

- 極薄フィルムがぴったり密着するから水分の通るスキマができず  
ムレにくく水も入り込みにくい
- 面板のフチをしっかりカバーして防水  
面板が水で溶けるのを抑える

水泳や  
しっかり浸かりたい温泉  
運動後のシャワーに



ストーマ装具の面板を、しっかり固定するサージカルテープ



**moval** ムーバル

20枚入り  
1,650円(税込)  
1回あたり165円  
(2枚使用の場合)

**moval (ムーバル) 規格表**

サイズ	品名コード	販売希望小売価格	入数
幅 3.5cm × 直径 16cm	YB-R35160	1,650円(税込)	20枚

※凹凸のあるところや動きが大きい部分など、モレが気になる箇所だけに貼ってもOK。  
※**moval**のサイズが小さすぎる・大きすぎる場合は、自分で好きな大きさにカットして  
使えるロールタイプのフィルム「エアウォールふ・わ・り」もあります。

**製品のご購入**

**\*ストーマ用品お取り扱い店**

お取り扱いの有無や在庫状況は、普段ご利用のお取り扱い店へ直接お問い合わせください。



\***moval** がストーマ用品の給付対象に当たるかどうかは、お住まいの市区町村で異なりますので、各市区町村の福祉事務所へお問い合わせください。

●**skinix**の公式Webサイト、楽天市場、Amazonなどでもご購入いただけます。

**moval** は、イギリスの  
ストーマケア用品メーカー  
Welland Medical社  
との共同開発で生まれました。

**【使用上の注意】**  
●**moval** は未滅菌ですので、創部に直接貼付しないでください。●貼付部分の水分や汚れはよく拭きとり、清潔にしてください。水気があるとうつきにくい場合があります。●小児に使用させる場合は、保護者の指導監督のもとに使用してください。●本品の使用により、発疹・発赤・かゆみ・水疱等があらわれた場合には、使用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。●救急絆創膏にかぶれやすい方は、注意して使用してください。

**【保管方法】**  
●直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所で保管してください。●小児の手の届かないところに保管してください。

ZZ040 23.04.5.000 第4版

テープが医療にできること、もっと。

**skinix**

www.skinix.jp

株式会社 共和 メディカルグループ  
大阪本社：〒557-0051 大阪市西成区巽3-20-28  
TEL：06-6658-8217  
東京本社：〒135-0016 東京都江東区東陽5-29-16  
TEL：03-5634-3843

もっと自由に、  
もっとジブンらしく。

アクティブLifeのための、ストーマフィルム

**moval** ムーバル

どんな動きにもしっかりついてくる

さらっと快適、気分も軽く

水濡れも気にならない

**skinix**