

貼り方&メイクのワンポイント! .....



目盛りを目安に、傷跡より大きめにカットします。 ※目盛りは1cm間隔です。



テープの角を丸く切ると、端からめくり上がりやすく綺麗にご使用いただけます。



テープを貼ったら上から軽く押さえ、表面のフィルムを左右に剥がしてください。



ファンデーションは少量ずつ馴染ませていただくと、テープの端にたまりにくく綺麗に仕上がります。

肌にやさしいはがし方 .....



テープのふちを指の腹でやさしくこすり、少しはがします。



はがしたところを持ち手にして、テープを肌と平行に引っ張りながらゆっくりはがします。

未滅菌ロール状UVカットフィルムドレッシング

用途: UVカット・傷跡の保護 ※医師の指示に従って、ご使用ください。

★傷跡…滲出液や血液などがなく創面がふさがっている状態。

エアウォールUV規格表

品名	規格	サイズ	品名コード	個装		
				販売希望 小売価格	入数	JAN [4971620]
エアウォール UV	NO.19	19mm×3m	MA-E3019-U	1,030円	1巻	860809
	NO.25	25mm×3m	MA-E3025-U	1,030円	1巻	860489
	NO.50	50mm×3m	MA-E3050-U	1,870円	1巻	860496

※販売希望小売価格には、消費税は含まれておりません。



ロール状なので  
使用する  
分だけカット!

【使用上の注意】●エアウォールUVは未滅菌ですので、直接創部に貼付しないでください。●紫外線が強い場合、高いUVブロック率により日焼け跡が残る可能性があります。他の日焼け対策との併用をお勧めします。●貼付部分の水分や汚れはよく拭きとり、清潔にしてください。水気があるときに貼付する場合があります。●小児に使用させる場合は、保護者の指導・監督のもとに使用してください。●本品の使用により、発疹、発赤、かゆみ等があらわれた場合には、使用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。●救急絆創膏にかぶれやすい方は、注意して使用してください。【貯蔵及び保管方法】直射日光があたらない、湿気の少ない所に保管してください。●小児の手の届かない所に保管してください。【ゼロ感覚フィルムドレッシング 注釈★】ゼロ感覚とはまるでテープを貼っていないかのような感覚を意味しています。ただし感覚には個人差があります。【UVブロック率および持続結果 注釈※】自社調べ

テープが医療にできること、もっと。



www.skinix.jp

株式会社 共和  
メディカルグループ  
大阪本社  
〒557-0051 大阪市西成区橋 3-20-28  
TEL: 06-6658-8217  
東京本社  
〒135-0016 東京都江東区新堀 5-29-16  
TEL: 03-5634-3843

もっと知りたい! 傷あとケア

エアウォールUV 検索

QRコードから



または

ゼロ感覚フィルムドレッシング



紫外線約97%カット  
透明・極薄  
UVカットテープ



www.skinix.jp



# 傷跡ケアの、 未来のかたち。




傷が癒えたら、治療は終わり——。  
そんな医療現場へ、新しいアプローチの誕生です。  
傷跡へ貼る透明・極薄のUVカットテープ・エアウォールUV。  
肌に残るくすみや赤み。  
やむを得ない、どうしようもない、そんな常識をリセット。  
傷ケアのあとには、傷跡ケアを。  
今、「あたりまえ」が、少しずつ変わり始めます。

## 肌が受ける、“セカンドダメージ”

傷跡がシミになるのは、メラニンの色素沈着が要因のひとつ。

メラニンは紫外線を浴びると生成されますが、外傷を負った肌は紫外線の影響を受けやすい状態。特に注意したいのが、肌の奥まで届き老化を促進する「UV-A波」、短時間で肌に炎症を起こし皮膚がんの要因ともなる「UV-B波」です。

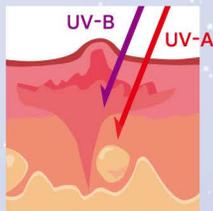


## 約97%\*、紫外線A・B波をブロック!

エアウォールUVは、肌をやさしくいたわりながら「UV-A波」「UV-B波」を平均約97%カット。メラニンの生成・色素沈着を抑えて、傷跡を残りにくくします。

## 長時間、高いUVブロック率キープ!

「塗る」ではなく「貼る」から、長時間安定して高いUVブロック率が長持ち。日焼け止めクリームのように汗や皮脂・衣類の擦れなどで落ちにくいうえ、塗りムラがなく、塗り直しも不要です。小さなお子さまからご高齢の方まで、安心して使用いただけます。

### “UVブロック率 持続結果”

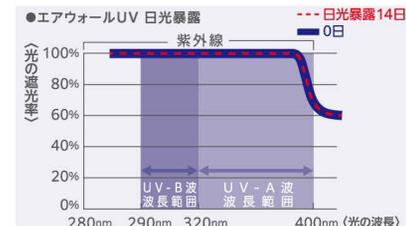

14日間日光に当て続けた後も、ほとんど変わらず紫外線を平均97%カット。安心してお使いいただけます。

\*テープの貼付可能期間ではありません。

### “水や汗に強く、はがれにくい”



プールや海水浴で使用しても、水や汗に強いからのはがれにくく、また濡れてもUVブロック率はそのままです。

## 目立ちにくく、メイクも可能!


エアウォールUVは、テープ表面にテカリを抑える特殊加工をプラス! 光の反射を抑え見た目も自然な印象です。さらに、このテープの上からファンデーションも使用可能なため、普段通りメイクを行っていただけます。

### “色浮きせず、肌なじみ抜群!”



肌色テープに比べ極薄なので、違和感なく肌にフィット。さらに透明なので、どんな肌の色にも馴染みます。

### “テープの上からいつものメイクを。”

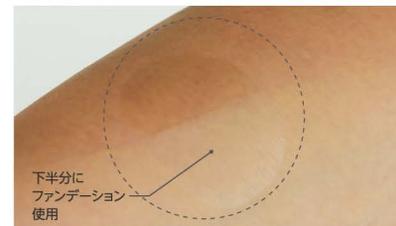

顔に使っていただく場合も、テープにファンデーションがのるため、さらに馴染んで目立ちにくくなります。

## よくあるご質問

Q 毎日貼り替えなければいけませんか?

A 肌に異常がなければそのまま貼り続けることができますが、テープがはがれてきたら貼り替えてください。貼っている間高いUVブロック率は持続します。顔など皮脂の多い箇所はテープがはがれやすくなるため、1~2日での貼り替えをお勧めします。

Q 軟膏などを塗った上から貼ると剥がれてしまいます。どうしたらいいですか?

A 軟膏などを塗った肌は、テープの貼り付きが悪い場合がございます。そのため使用される際には、塗った範囲より大きくテープを切って、貼付してください。

Q テープを貼ったまま、お風呂に入っても大丈夫ですか?

A エアウォールUVは防水性もありますので、貼ったままお風呂やプールなどに入っております。ただし、長時間にわたって使用する場合には、テープが剥がれていないか確認を行ってください。