

# 貼り方ガイド

【末梢静脈カテーテル固定用】

## フレームタイプ

No.70F / No.120Fの2サイズ



動画はこちら

大きな窓で刺入部を見ながら貼れる



オモテ

フレームで端までシワなく貼れる

ガイドスリットで、貼り付け位置の目安に。



ウラ

## 器具の痛みにも しっかり対処を! 「ココロール カテ用」

フィルムの不快感を解消したら、器具（ロック部分）の圧迫による不快感や痛みにも、「ココロール カテ用」でぜひ対処を。

ロック部分の下にサッと貼るだけで、圧迫を分散して痛みを起きにくくし、MDRPU（医療関連機器褥瘡）リスクも軽減します。


ココロール カテ用は  
こちら



No.70Fを使用して説明しています。



オモテにある中央の四角い紙をはがします。周りのフレームは、まだはがさないでください。

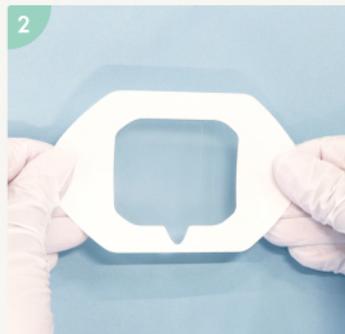

ウラの剥離紙を全てはがします。端の粘着剤が付いていない部分を持ち手にしてください。



刺入部がフレームの中心にくるように、確認しながら位置を合わせます。

### Point

ガイドスリットがロック部分に重なるようにすると、刺入部を中心に合わせやすくなります。



スキマなく貼るために、カテーテルの周りを押さえながら貼ります。

### Point

カテーテルに沿わせて、包み込むように貼ると、より密着させることができます。



テープ全体を押さえ、しっかり肌へ密着させます。



### Point

ガイドスリットの細かい部分をちぎります。

フレーム下部のガイドスリットをつまんでちぎります。



スキマなく貼るために、カテーテルの周りを押さえながらフレームをはがします。



完成! ✨

カテーテルがしっかり固定されているか、確認してください。

テープが医療にできること、もっと。

# skinix®

www.skinix.jp

株式会社 共和 メディカルグループ