

# 貼り方ガイド

【末梢静脈カテーテル固定用】

## レギュラータイプ

オモテにセンターガイドがあります。



動画はこちら

オモテ



センターガイド

ウラ



貼り方  
イラスト付き

## 器具の痛みにも しっかり対処を！ 「ココロール カテ用」

フィルムの不快感を解消したら、器具（ロック部分）の圧迫による不快感や痛みにも、「ココロール カテ用」でぜひ対処を。

ロック部分の下にサッと貼るだけで、圧迫を分散して痛みを起きにくくし、MDRPU（医療関連機器褥瘡）リスクも軽減します。


ココロール カテ用は  
こちら



No.6070Rを使用して説明しています。No.4050Rは剥離紙の形状が異なります。



ウラの大きい剥離紙をはがします。残りの剥離紙は持ち手にするので、まだはがさないでください。

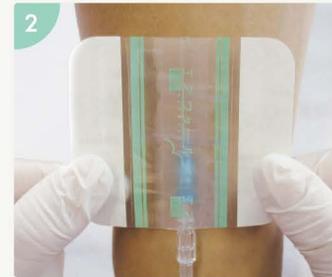


テープの両端を持って、刺入部がテープの中心へくるように合わせます。



### Point 中心に合わせるコツ

カテーテルをセンターガイドの文字に重ねると、穿刺部を中心に合わせやすくなります。

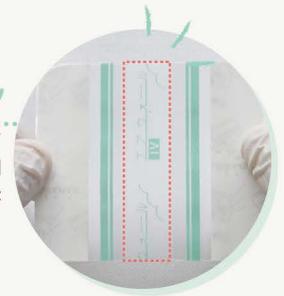


テープの両端を持って、刺入部がテープの中心へくるように合わせます。



### Point 密着のコツ

カテーテルに沿わせて包み込むように貼ると、より密着させることができます。

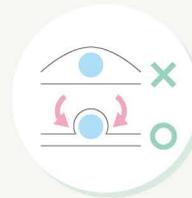

両端の剥離紙をはがし、テープを端まで貼ります。



テープ全体を押さえ、しっかり肌へ密着させます。



センターガイドの端から、オモテのフィルムをゆっくりはがします。



カテーテルを押さえながら、残りのフィルムもゆっくりはがします。

### 完成!

カテーテルがしっかり固定されているか、確認してください。



テープが医療にできること、もっと。

# skinix®

www.skinix.jp

株式会社 共和 メディカルグループ