

貼り方ガイド

【中心静脈カテーテル固定用】

切り込みタイプ

No.6080V / No.9010Vの2サイズ



動画あり

【ゼロ感覚フィルムドレッシング注釈】ゼロ感覚とはまるでテープを貼っていないかのような感覚を意味しています。ただし感覚には個人差があります。



No.9010Vを使用して説明しています。



- 貼付範囲を清潔に保つためにフィルムよりも大きい面積を消毒します。
- 消毒液がしっかり乾いた状態でフィルムを貼りはじめます。



剥離紙に書いている矢印方向に紙をはがします。



切り込みがない方を持ち手にして、カテーテルの位置をひし形ホールに合わせながらしっかり肌に貼り付けます。



フィルムが浮かないように、不織布がついたフレームを左右にゆっくりはがします。




切り込み部分の剥離紙をはがし、カテーテルの下で重なるように貼ります。



付属の不織布テープ1・2本目は、カテーテルが動かないように、切り込みの不織布付近に貼ります。



3本目の不織布テープは、ルートの方に貼って、しっかり固定します。

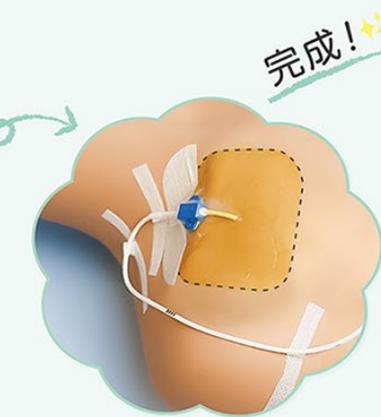

最後にはみ出た消毒液を拭き取ってください。ナート部分がフィルムで覆われており、刺入部がしっかり見えているか、確認してください。

テープが医療にできること、もっと。