



豊富な形&サイズで、貼りもれなく全体をしっかりとカバー。
病棟でも、手術室でも、さまざまなシーンでお使いいただけます。

【ラインナップと貼付例】


正方形
(4サイズ)

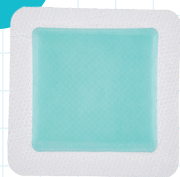

10cm×10cm
12.5cm×12.5cm
15cm×15cm
20cm×20cm

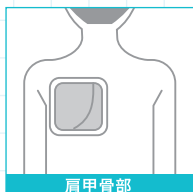

肩甲骨部

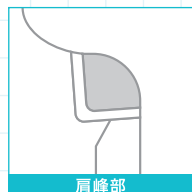


肩峰部



外踝部




踵部

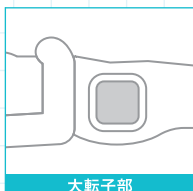

大転子部



肘・膝部

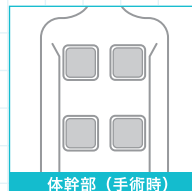

体幹部 (手術時)

長方形
(1サイズ)



12.5cm×30cm




脊柱部

ハート形
(1サイズ)



18cm×18cm

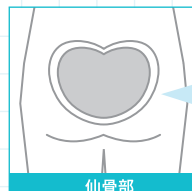


仙骨部


※貼り方や使用シーンは一例です。実際の状況に応じ、最適な方法でご活用ください。

踵部の貼り方


切り込みを入れることで、踵部にしっかりとフィットさせることができます。

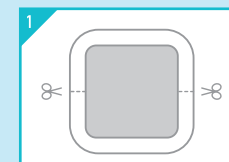


両サイドの真ん中に切り込みを入れます。

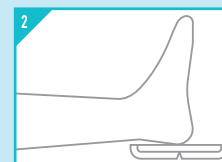


パッドの中心を踵部の頂点に軽く貼ります。

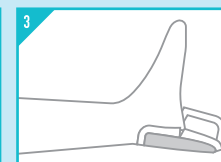

足首側の半分をカーブに沿わせて貼ります。

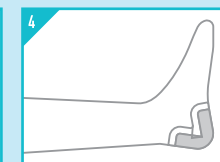

残りの半分を、シワにならないよう全体に密着させます。

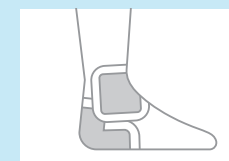


踵部と外踝部を同時に保護したい場合は、組み合わせて貼ることも可能です。


仙骨部の貼り方




ハートの下側中央にあるミシン目を切り離します。

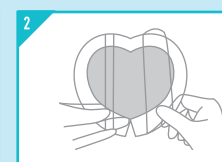


大きい方の剥離フィルムのみを剥がします(小さい方の剥離フィルムはそのまま剥がさないでください)。

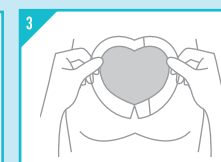

仙骨部に位置を合わせて、パッド部分のみを軽く貼ります。

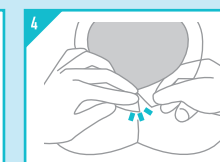

剥離フィルムを剥がした方の切り込みを臀裂部に貼り込みます。

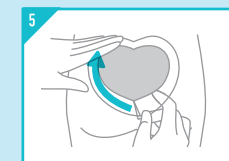

貼り込んだ切り込みを起点に、円を描くようにしわを伸ばしながら片側を貼ります。



残りの剥離フィルムを剥がし、同様に円を描くようにしわを伸ばしながら貼ります。



臀裂部でテープ同士を重ね合わせ、スキマを最小限にするように貼り込みます。

テープが医療にできること、もっと。

skinix®
www.skinix.jp


株式会社 共和 メディカルグループ

ZZ062 26.07-3,000 第2版


＼ こんなところへ、プレスワイプ /

病棟


仰臥位

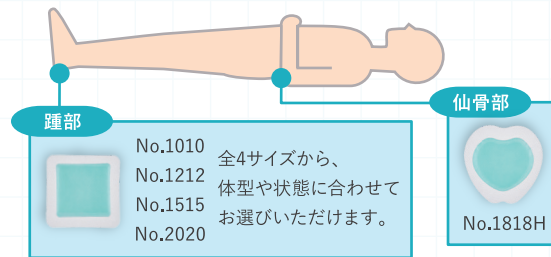

側臥位

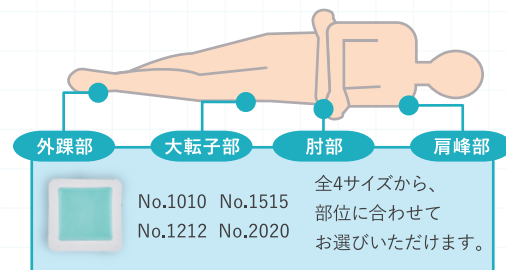


座位

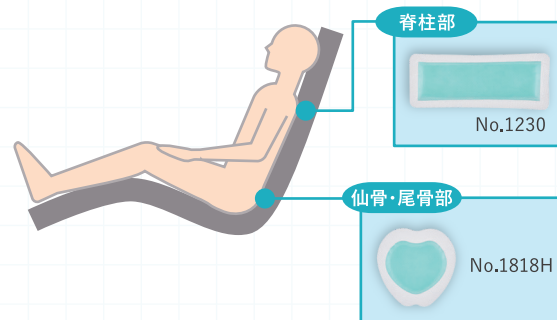


オペ室

碎石位の 頭低位

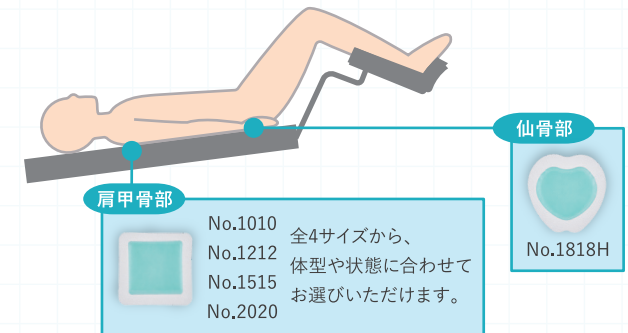

側臥位・ パークベンチ 体位

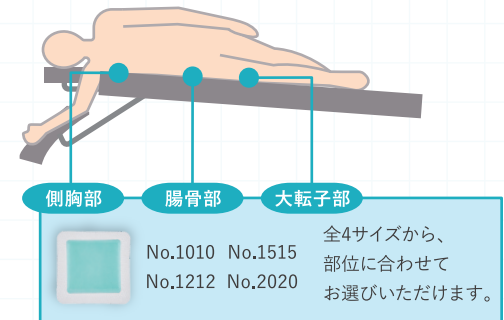

腹臥位 (伏臥位)

