


自宅でプロの傷あと*ケアを再現！

アトレスケアは伸ばして貼るだけ！
自分でいつでも手軽に傷あと*ケアを実現できます。

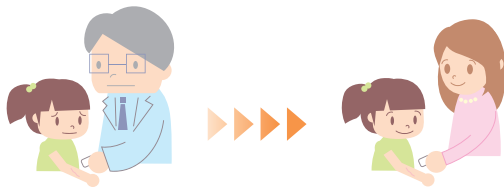

自分で積極的に傷あと*ケアする時代へ

テープを伸ばし、傷あとに当てて貼るだけ。自宅でプロの処置を再現できるように、テープの構造や手順にこだわりました。貼り替えも自分でできるので、長期間の傷あとケアもストレスなく、快適に続けられます。

特長1 傷あと*だけに『寄せる力』を加える


伸ばしたテープの縮む力を利用して、
広がろうとする傷あと*に
ピンポイントに寄せる力を加えます。

中央だけが均一に縮むから、
『寄せる力』が傷あと*だけに！



テープを左右にひっぱると、
切り込み部分だけが凸凹状に均一に伸びます。
そのまま傷あとに貼ることで、
傷あと部分だけ、
ピンポイントにテープが縮みます。


傷あとと周辺部は、
皮膚トラブルが起きにくい！

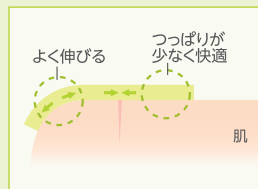

テープを貼っている傷あと以外の部分や
肌の凹凸・曲面部分には
やわらかくフィットし、つっぱりません。
テープはとても肌になじみやすいので、
皮膚トラブルが起きにくいです。

よくあるご質問

- Q** アトレスケアはどこに使うのですか？
A 縫合した傷の抜糸後すぐの傷あと*にご使用いただけます。その際、滲出液や血液が出ていれば、ご使用をお控えください。
- Q** どのくらいで交換したらいいですか？
A 2～3日に1回を目安に交換してください。はがれてきたら、貼りかえ時です。
- Q** 傷あとがテープよりも大きい場合はどうしたら良いですか？
A 右図のようにテープは隙間を空けずに、少しでも重なるようにして貼り、傷あと*の長さに合わせた枚数を使用してください。
- Q** テープを貼ったまま、お風呂に入ってもはがれませんか？
A アトレスケアは防水性があります。そのため貼ったままでの入浴やシャワー浴が可能です。
- Q** アトレスケアはどうやってはがせば良いですか？
A テープのふちを優しくこすり、めくる部分を作ります。傷あと*に刺激を与えないよう、やさしくゆっくりはがしてください。

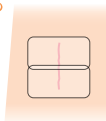

アトレスケア規格表

※販売希望小売価格には、消費税は含まれておりません。

規格	サイズ	品名コード	販売希望 小売価格	入数
No.S10	25mm×50mm	YB-Q2550S1	1,030円	10枚
No.S30	25mm×50mm	YB-Q2550S	2,835円	30枚
No.M10	50mm×50mm	YB-Q5050S1	2,080円	10枚
No.M30	50mm×50mm	YB-Q5050S	5,670円	30枚

用途：抜糸後の傷あと*の被覆保護

製品のご購入

アトレスケア

検索

テープが医療にできること、もっと。

skinix®
www.skinix.jp

株式会社 共和 メディカルグループ

大阪本社：〒557-0051 大阪市西成区橋 3-20-28
TEL：06-6658-8217
FAX：06-6658-8101

東京本社：〒135-0016 東京都江東区東陽 5-29-16
TEL：03-5634-3843
FAX：03-5634-3845

【使用上の注意】●アトレスケアは抜糸後の傷あと*に使用する未滅菌のテープです。直接創部に貼らないでください。●安全にお使い頂くため、アトレスケアの使用に際しては、必ず医師の指示に従ってください。●本品の使用により、発疹・発赤・かゆみ・水疱等があらわれた場合には、使用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。●貼付部分の水分や汚れはよく拭き取り、清潔にしてください。水気があるとつきにくい場合があります。●油分の多い部位に貼るとはがれやすいため、顔や頭部に貼る場合は注意して使用してください。●テープ部のはがれ・浮き等がないよう貼付してください。また、観察時にそれらが発見された場合には、貼りかえてください。●関節等に使用する場合は、皮膚を伸ばした状態で使用してください。（医師から具体的な指示がある場合はその指示に従ってください。）●救急絆創膏にかぶれやすい方は、注意して使用してください。●アトレスケアは伸縮性のある商品ですが、引っ張りすぎるとテープが破れたり、ちぎれたりする場合がありますので注意して使用してください。●傷あとの長さにあわせて枚数を使用してください。【保管方法】●直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所で保管してください。●小児の手の届かないところに保管してください。【テープ交換の目安】2～3日に一回を目安に交換してください。はがれてきたら貼りかえ時です。【★注釈】傷あととは滲出液や血液などがなく、創面がふさがっている状態のことを指します。

ZZ016 23.04-10,000 第6版

skinix®

気になる傷あと、どうしていますか？

抜糸後からはじめる、
“本格”傷あとケア。

傷あとケア専用テープ

アトレスケア

Sサイズ



Mサイズ



www.skinix.jp

積極的にはじめる、傷あとケア専用テープ

アトレスケア 誕生。

抜糸後の傷あと、
気になるなあ。

帝王切開の傷あとって
どうなるんだろう…。

抜糸した後、
ケロイドにならないかしら？

「抜糸も終わって、傷はふさがったけれど…」
傷が癒えたあとも、心配や不安は残ります。

そこで新たに誕生したのが、
傷あとケア専用テープ“アトレスケア”。

寄せる力を加えることで、傷あと*は広がりにくく、
革新的な傷あとケアを実現できます。

特長1 傷あと*だけに『寄せる力』を加える

特長2 まるで貼っていないような感覚

アトレスケアで先進の傷あとケアを。


安全にお使いいただくため、使用に際しては必ず医師の指示に従ってください。

特長2 まるで貼っていないような感覚

先進の医療用テープ“アトレスケア”は、透明でわずか0.007mmの薄さ！
髪の毛と比べると、約1/20の薄さで、ムレ・つぶりがほとんどありません。
そんな肌への優しさを極限まで追求した、快適な透明のテープです。
貼っていることを忘れるほどの自然な貼りごちを実現しました。


汗をかいてもムレない！

従来の自社テープ

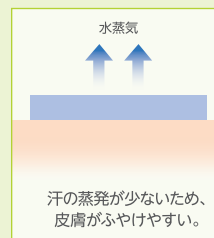

汗の蒸発が少ないため、
皮膚がふやけやすい。

アトレスケア

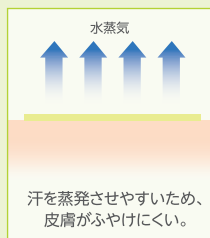

汗を蒸発させやすいため、
皮膚がふやけにくい。

水蒸気透過性が非常に高く、
汗の蒸発を妨げないので、
長時間貼っていても
ムレによるかゆみや
不快感がほとんどありません。

水蒸気透過量が約**4倍**！
テープを透過する水蒸気量の差(24時間1㎡当たり)

伸縮性があるからつぶらない！

従来の自社テープ アトレスケア



伸縮性に優れているため、
動きに沿ってしなやかに伸び縮みし、
皮膚ストレスを軽減します。
水ぶくれや赤みなど皮膚トラブルの原因となる、
肌の固定やつっぱり感から開放します。

伸び率の差が約**15倍**！
同重量のおもりを吊るした時の伸び率の差

※当社比


貼り方手順

※傷から血液等が出ていないことをご確認ください。

■両手貼り



裏の白い紙(大きい方)を
途中まではがします。

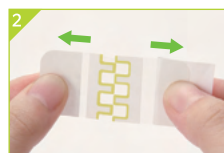


テープを表に返し、両手で左
右の凸の切り口が綺麗に揃
うまで徐々に引っ張ります。



テープ中央に傷あと*を合
わせ、引っ張ったままっか
り貼ります。



白い紙を全てはがし、上か
ら押さえ、テープを端まで
しっかり貼ります。

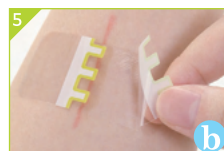

表の透明なフィルムをゆっ
くりはがします。



最後にテープを肌になじま
せて、完成です。テープは透
明なので目立ちません。

■片手貼り



裏の白い紙(小さい方)をは
がします。



テープを傷あと*に合わせ、
①ではがした部分を貼りま
す。



裏の白い紙(大きい方)を途
中まではがします。



②で貼ったところを押さえ、
他の指で反対側の端をつま
んで引っ張ったまま、っか
り貼ります。




残りの白い紙を全てはが
し、上から押さえて貼り、表
の透明なフィルムをゆっくり
はがします。




最後にテープを肌になじま
せて、完成です。テープは透
明なので目立ちません。

貼り方の
コツ


a b c

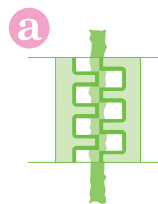

左右の凸の切り口が綺麗に
揃うまで引っ張ります。
テープの中心と傷が重なる
ようにして、伸ばした状態で
貼ります。

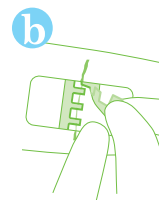

透明なフィルムをはがす時は
貼っているテープがはがれ
ないように、テープを押さえ
ながら、ゆっくりはがします。
特にテープの周囲は、注意し
ながらはがします。

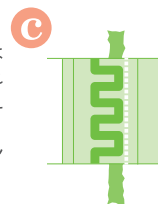

テープを貼るときに、図のよ
うに合わせるとテープを伸
ばして貼るときに傷あと*が
中央にきます。