


貼り方の手順

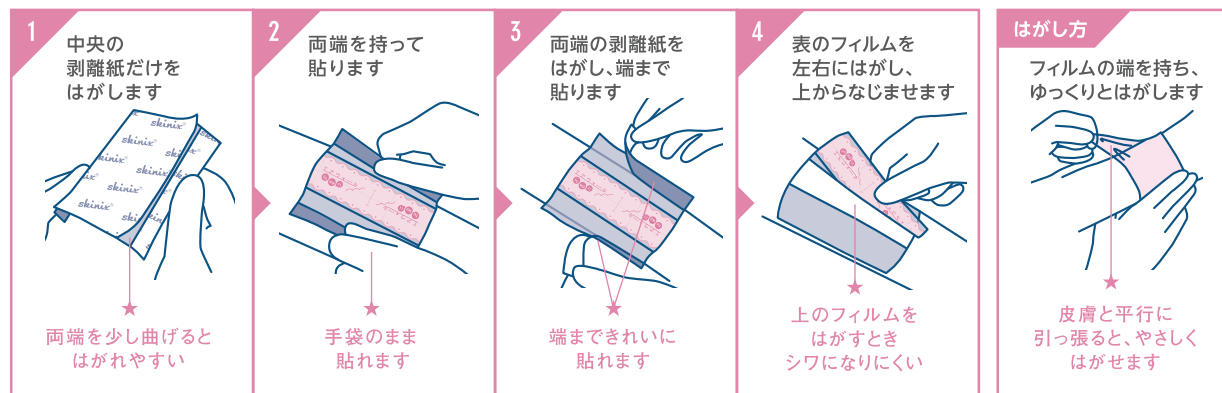

※シングルスリット、および50mm幅の製品は貼り方が異なります。パッケージにある貼り方の手順をよく読んでご使用ください。

未滅菌ロール状フィルムドレッシング

用途：ガーゼ・パッドなどの被覆固定、入浴・シャワー時の防水、
ストーマ装具装着部位の防水、褥瘡対策などにおける皮膚の被覆など。



エアウォールふ・わ・り規格表

品名	規格	サイズ	品名コード	個装			内装	外装	
				販売希望 小売価格	入数	JAN [4971620]		ケース	GTIN [14971620]
エアウォール ふ・わ・り (5M)	NO.50	50mm×5m	MA-E5050FT	1,300円	1巻	860625	—	16巻	860622
	NO.100	100mm×5m	MA-E5100FT	2,350円	1巻	860632		12巻	860639
	NO.150	150mm×5m	MA-E5150FT	3,250円	1巻	860649		8巻	860646
エアウォール ふ・わ・り (12M)	NO.50	50mm×12m	MA-E050-FT	2,800円	1巻	860564	6巻	4箱	860561
	NO.100	100mm×12m	MA-E100-FT	5,100円	1巻	860571	4巻		860578
	NO.150	150mm×12m	MA-E150-FT	7,100円	1巻	860588	2巻		860585
エアウォール ふ・わ・り (20M)	NO.5020	50mm×20m	MA-E2050FT	4,500円	1巻	860595	—	12巻	860592
	NO.1020	100mm×20m	MA-E2100FT	8,200円	1巻	860601		8巻	860608
	NO.1520	150mm×20m	MA-E2150FT	11,400円	1巻	860618		4巻	860615
エアウォール ふ・わ・り シングルスリット	NO.1020	100mm×20m	MA-E2100FS	8,200円	1巻	860700	—	8巻	860707
	NO.1520	150mm×20m	MA-E2150FS	11,400円	1巻	860717		4巻	860714

※販売希望小売価格には、消費税は含まれておりません。

【使用上の注意】●エアウォールふ・わ・りは、未滅菌ですので直接カテーテル入部や創部に貼付しないでください。●貼付部分の水分や汚れはよく拭きとり、清潔にしてください。水気があるとつきにくい場合があります。●小児に使用させる場合は、保護者の指導監督のもとに使用してください。●本品の使用により、発疹、発赤、かゆみ等があらわれた場合には、使用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。●救急絆創膏にかぶれやすい方は、注意して使用してください。【保管方法】●直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所で保管してください。●小児の手の届かない所に保管してください。★ゼロ感覚とはまるでテープを貼っていないかのような感覚を意味しています。ただし感覚には個人差があります。

テープが医療にできること、もっと。

skinix®
www.skinix.jp

株式会社 共和 メディカルグループ

大阪本社：〒557-0051 大阪市西成区橋 3-20-28
TEL: 06-6658-8217
FAX: 06-6658-8101

東京本社：〒135-0016 東京都江東区東陽 5-29-16
TEL: 03-5634-3843
FAX: 03-5634-3845

超・ゼロ感覚フィルムドレッシング

エアウォール

fu wa ri

www.skinix.jp



fu wa ri

ゼロ感覚を超える、 驚きの“ふわり感”。

貼っているときの快適さ=ゼロ感覚*はもちろんのこと、
はがすときのやさしさを徹底的に追求したテープ、
「エアウォールふ・わ・り」。

あのエアウォールの極薄“ゼロ感覚”フィルムはそのまま、
新開発のふわりゲルが、はがすときの刺激やダメージから肌を守り、
体験したことのない“ふわり感”を実現しました。

新発想〈シナジーフィット構造〉で 実現した、理想的なやさしさ。

美容フェイスマスクが肌にぴったり貼りつく原理に着目した、
新開発「ふわりゲル」を採用。
大好評の7ミクロン 極薄エアウォール・フィルムとの相乗効果（シナジー）で、
いままでの粘着テープの概念を超える、
しっとり繊細な貼りごちと、やわらかな剥がしごちを実現しました。

新開発の超低刺激・密着ゲル

ふわりゲル

ゲルの密着力でやさしく貼りつき、
はがすときに角質剥離が
起こりにくい

7ミクロンの“ゼロ感覚”極薄フィルム

エアウォール・フィルム

ムレ・つっぱり・はがれにサヨナラ。
貼っていることを
忘れるほどの快適さ

〈シナジーフィット構造〉

密着ゲルと極薄フィルムの相乗効果で、
貼っている時も、はがす時も、皮膚刺激を極力減らし、
テープかぶれの軽減につながりました。

驚きの“ふわり感”を生み出す、理想のコンビ。

ふわりゲル


新開発の超低刺激ゲルが、肌に密着するように貼りつき、
はがすときに角質剥離が起こりにくい。

角質剥離に、サヨナラ。

○ やさしく肌へフィット

新開発の「ふわりゲル」は、従来の「粘着」という概念を根本から見直しました。
美容フェイスマスクが肌に密着する原理を応用し、
肌の凹凸にミクロレベルでフィットする密着力の高いゲルを独自開発。
肌を包み込むような、ふわりとやさしい貼りごちを実現しました。

従来のフィルムドレッシングに使われている「粘着剤」は、
肌の微細な凹凸にまでフィットせず、そのぶん少ない接点で強固にくっついています。

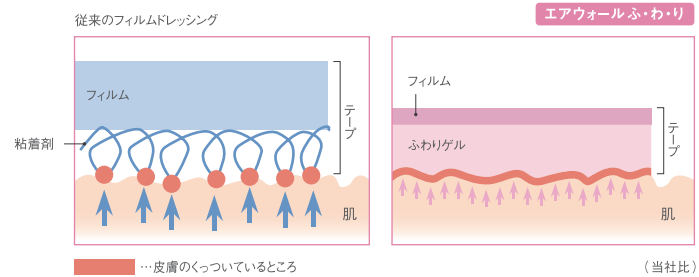


○ やさしくはがせる

従来の粘着剤は少ない接点で強固にくっついているため、テープをはがすとき
一緒に多くの角質をはがしてしまい、皮膚ダメージの原因となります。

密着力の高いふわりゲルは、美容フェイスマスクをはがす時のように
しっとり滑らかにやさしくはがれます。
なので、角質剥離を大幅に抑え、肌ダメージを軽減した驚きの“ふわり感”です。

剥離された角質量の比較

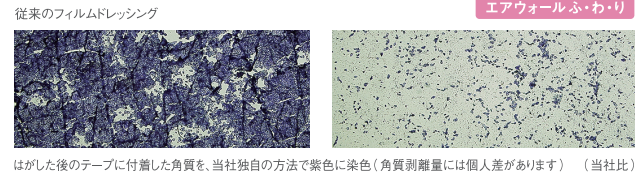


はがした後のテープに付着した角質を、当社独自の方法で紫色に染色（角質剥離量には個人差があります）（当社比）

エアウォール・フィルム

わずか7ミクロン、従来の約1/4*の薄さで、肌のキメにまでしなやかになじみ、
貼っていることを忘れる“ゼロ感覚”フィルム。


ムレに、 サヨナラ。

従来の約4倍*の水蒸気透過性で、
汗の蒸発を邪魔せず、
長時間使用しても
ムレによるかゆみや不快感が
ほとんどありません。

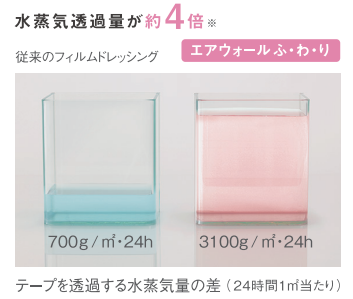


つっぱりに、 サヨナラ。

従来の約15倍*の伸縮性で、
肌のキメにまで
やわらかくフィットしながら、
動きに沿って
しなやかに伸び縮みし、
つっぱり感から解放します。

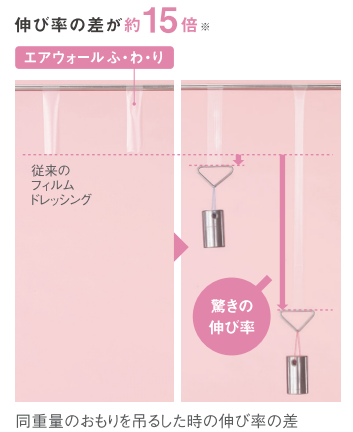

はがれに、 サヨナラ。

従来の約1/4*のフィルム薄さで、
ひっきりがほとんどないため
擦れてもはがれにくく、
長時間貼っても
ヨレや浮きが起きにくいので、
防水効果も保たれます。

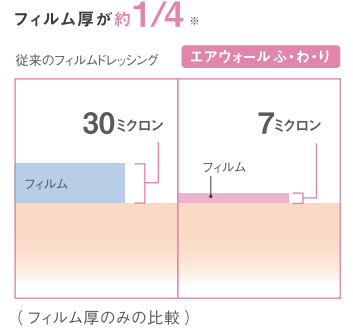

*当社比

“テープかぶれ”がなくなる日まで。

医療現場の深い悩み、テープかぶれ。その原因は実にさまざまです。

例えば「つっぱり感」のあるテープ。引っぱりに弱い皮膚には、
大きな負担となります。なので、
皮膚の動きに沿う高い伸縮性は、
皮膚トラブル防止にとっても
重要なのです。

またテープが安定して貼りつくための
粘着力は、はがす時に角質剥離の原因
となります。かと言って、粘着力が弱い
とすぐにはがれてしまう。私達はこの
矛盾を「密着」という新発想で根本から
見直しました。

他にも、かゆみや不快感を招く「ムレ」
や「ヨレ」の防止、防水機能不全に
つながる「浮き」の解消など、皮膚
トラブルのさまざまな原因を多角度
から検証し、解決できるように取り
組んできました。

「この世界からテープかぶれをなくしたい。」その思いが、またひとつカタチになりました。

