



経鼻チューブの固定には、クリアホールド

チューブの固定力と肌トラブルの悩みは、どの部位でも同じ。
特に肌が敏感で、汗や皮脂も多い鼻まわりでも、
メッシュフィルムがやさしくしっかりチューブ固定する「クリアホールド」は
患者さんも看護師さんもうれしい、経鼻チューブの新定番です。



尿道カテーテル・ドレーンチューブ固定用テープ

用途：尿道カテーテルや、ドレーンのチューブ部分の固定に

クリアホールドライナー規格表

品名	規格	サイズ	フレンチ数	品名コード	個装			外装	
					販売希望 小売価格	入数	JAN [4971620]	ケース	GTIN [14971620]
クリアホールド ライナー	M	55mm×72mm	20Fr以下用	YB-P20100T	7,000円	100枚	892244	18箱	892241
	L	70mm×90mm	26Fr以下用	YB-P26100T	9,000円	100枚	892251	12箱	892258

※標準希望小売価格には、消費税は含まれておりません。



M／55mm×72mm



L／70mm×90mm



【使用上の注意】

●本製品は、定められた範囲の医療用チューブ固定以外では使用しないでください。●本製品は、未滅菌ですので創部に直接貼付しないでください。●使用部位とそのまわりを清潔にし、水気をよく取って使用してください。水気があるとつきにくい場合があります。●明らかに感染を有している部位には使用しないでください。●固定力を保つため、テープ部のはがれ・浮き・シワ等がないよう貼付してください。また、観察時にそれらが発見された場合には、ただちに貼りかえてください。●本品の使用により、皮膚障害（発疹・発赤・かゆみ等）と思われる症状があらわれた場合には、使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。●固定したチューブが継続的に皮膚に接触・圧迫していると潰瘍となるおそれがあるため、使用中はよく観察を行い、適宜固定の位置や方向を変更してください。●救急絆創膏にかぶれやすい方は、注意して使用してください。

【保管方法】

●直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。●小児の手が届かない所に保管してください。

テープが医療にできること、もっと。

skinix®
www.skinix.jp

株式会社 共和
メディカルグループ

大阪本社
〒557-0051 大阪市西成区橋3-20-28
TEL：06-6658-8217

東京本社
〒135-0016 東京都江東区東陽5-29-16
TEL：03-5634-3843

尿道カテーテル・ドレーン固定テープ

クリアホールド
ライナー

尿道カテーテルやドレーンの固定に。

抜去も肌トラブルも クリアホールドライナーで対策！



問題発生メカニズムに着目した、新発想 **ライナー構造**。
現場の悩みに応えるさまざまな工夫も。

ライナー構造

伸びない不織布と、伸びの良いウレタンフィルム、
2種類の素材を適材適所で使い分けた、新発想のライナー（内張り）構造です。

【不織布】パート

伸びない不織布でチューブを
しっかりホールドし、オメガ留めも安定。
肌への貼り付き部分は最小限にし、
肌負担を回避します。

【快適フィルム】パート

肌トラブルに最大限配慮した、
柔らかく快適なフィルム。
肌の伸び縮みにもしなやかに追従し
肌トラブルを起こしにくい。

ハガレに強い二重ロック


大きな力がかかる末端は、
二重ロックでしっかり固定。



二重ロックと力の分散で、
抜けにくい。テープが簡単に持ち上がり
抜け・剥がれが起きやすい

理想的なオメガ留め


チューブが外れにくく、肌を圧迫や擦れから守る
オメガ(Ω)留めが、誰でもカンタンに。

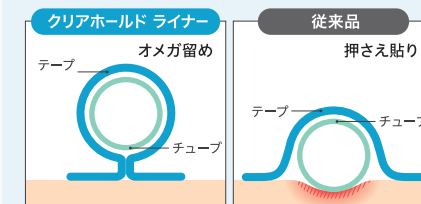

テープが全面に密着し
抜けにくい。肌をチューブの
圧迫や擦れから守る。不安定で抜けやすい。
肌がチューブで擦られ
肌トラブルが起きやすい。

快適&安心メッシュフィルム

全方向によく伸びて、水蒸気透過性があり、
ムレにくく、透明・防水で安心。

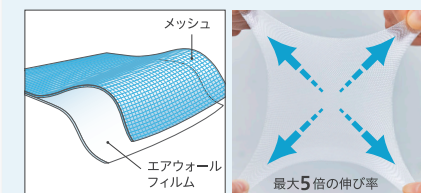

よく伸びてムレにくい
極薄「エアウォールフィルム」
をメッシュで補強 全方向によく伸び
肌の動きにやわらかく追従
をメッシュで補強

しっかり固定

肌へのやさしさ

誰でもカンタンにオメガ(Ω)留め！

固定方法の統一がカンタンね！
現場への導入もスムーズだわ！




チューブを挟んで端を重ねるだけ。誰でも自然に&カンタンに、
高度なオメガ(Ω)留めができます。コツいらずで一度できれいに貼れて、現場の効率もアップ。

現場の悩みや問題の発生メカニズム

抜去や内部の炎症・感染

抜去

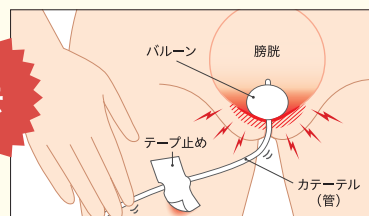

テープ固定が甘くチューブが動くと、バルーンが膀胱内に
当たり炎症に。ドレーンの抜去も深刻な問題になります。

緊張性発赤

肌
トラブル



テープが硬い(伸びが悪い)と、周囲の
皮膚を引っ張り、発赤や水疱が。

かぶれ



ムレやすいテープ素材や刺激の強い
粘着剤などで肌トラブルが発生。


1. 片方を貼りつけて、 2. チューブを当て、折り返し 3. 二重ロックを重ねると 4. 自然にオメガ留めが完成！



中央の剥離紙を剥がし、
広い面を片方だけ肌に貼ります。



テープ中央にチューブを当て、
折り返します。

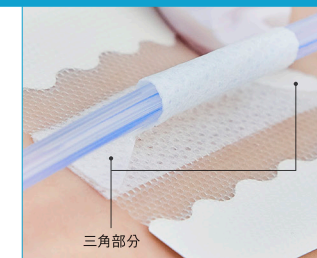

残ったテープの端の
三角(二重ロック部分)を重ねます。



誰でもカンタンにオメガ留め。
両端を貼りつければ完了です。