

超・ゼロ感覚フィルムドレッシング **パッド**

エアウォール

fu wa ri

あの/
エアウォール
ふ・わ・りに
パッド付き
登場!

これまでにない安心感。 「ふ・わ・り」がしっかり、きずを守る。

やわらかい貼りごちで好評のフィルムドレッシング「エアウォールふ・わ・り」に、
きずを保護するパッドが新たに付いて、これからは創傷部もやさしくしっかり守ります。

貼っていることを忘れるほどの、あの“快適・極薄フィルム”が、肌にぴったり密着。


水や細菌の侵入を防いで、創傷部を長くしっかりガードしてくれます。

肌にやさしくフィットする“密着ゲル”だから、弱い肌や何度も貼り替えるところにも安心。

今までになかった、この安心感。「ふわりパッド」です。

快適な貼りごち、ずっと続く


ムレもつっぱり感もほとんどなくて、貼っていることを忘れるほどの、
快適な貼りごちがずっと続きます。
肌への負担もずっと軽くなって、かぶれや赤みも軽減。

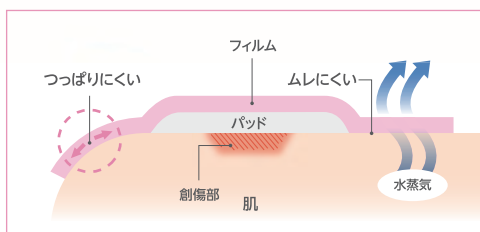


ぴったり密着、しっかりガード

極薄フィルムが肌のキメにまでぴったり密着して、
すきまができにくく、水や細菌の侵入もしっかり防ぐ。
創傷部をきちんと守れて、安心感が続きます。

従来のパッド付きフィルムドレッシング

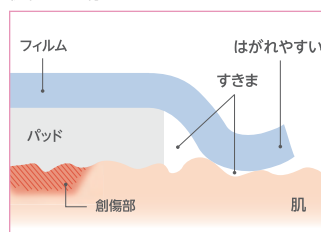

エアウォールふ・わ・りパッド

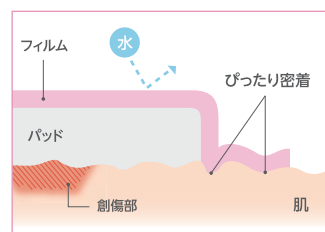


はがすときも、肌にやさしい


しっとり滑らかにはがせる“密着ゲル”で、角質剥離が大幅に減少。
交換回数が多くても、はがすときの肌へのダメージを軽減します。

【剥離された角質量の比較(フィルム部)】(当社比)

従来のフィルムドレッシング

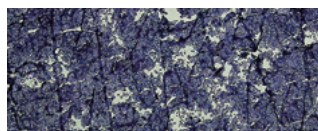

エアウォールふ・わ・りパッド

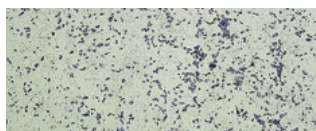

はがした後のテープに付着した角質を、当社独自の方法で紫色に染色(角質剥離量には個人差があります)


手間なく貼れて、衛生的

テープとパッドが一体型になった滅菌タイプ。
パッドに触れずにサッと貼れて、衛生的です。




傷口をやさしく保護

乾燥しても固着しにくい特殊ネット付きの
パッドで、はがすときまで、創傷部をやさしく
保護します。

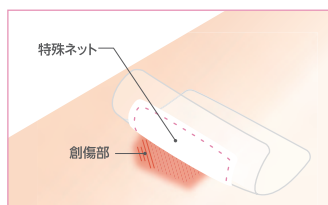

貼り方の手順

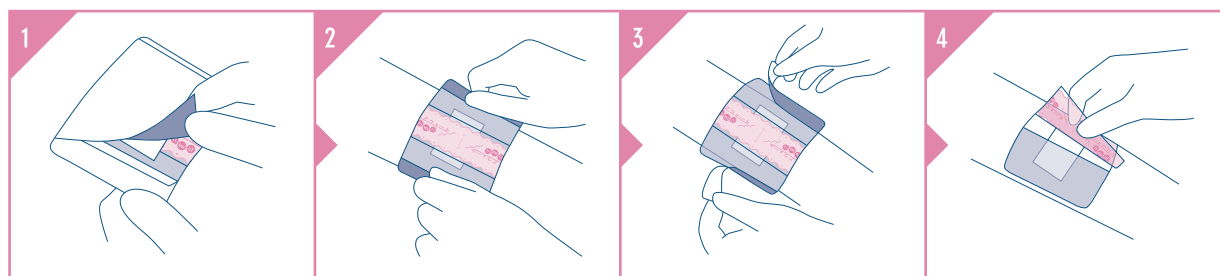

真ん中の大きい剥離紙をはがします。

両端を持って、パッド部分を傷口に当てるようにして貼ります。

両端の剥離紙をはがし、端まで貼ります。

表のフィルムを左右にはがし、上からなじませます。

使用目的または効果

●創傷面の保護



エアウォールふ・わ・りパッド規格表

販売名:エアウォールパッド
一般医療機器 救急絆創膏 届出番号:27B2X00038000018

品名	規格	サイズ		品名コード	個装			外装	
		テープ	パッド		販売希望 小売価格	入数	JAN [4971620]	ケース	GTIN [14971620]
エアウォール ふ・わ・りパッド 滅菌済医療機器	No.6070P	60mm×70mm	30mm×40mm	YB-226070P	4,200円	50枚	875346	10箱	875343
	No.6090P	60mm×90mm	30mm×60mm	YB-226090P	5,200円	50枚	875216	10箱	875213
	No.8010P	80mm×100mm	40mm×70mm	YB-228010P	4,800円	30枚	875223	10箱	875220
	No.1012P	100mm×120mm	50mm×80mm	YB-221012P	6,400円	30枚	875230	10箱	875237
	No.1014P	100mm×135mm	50mm×90mm	YB-221014P	6,800円	30枚	875247	10箱	875244

※販売希望小売価格には、消費税は含まれておりません。

【使用上の注意】●明らかに感染を有している部位には使用しないでください。●使用部位とそのまわりを清潔にし、水気をよく取って使用してください。水気があるとつきにくい場合があります。●貼付部位は、感染症・皮膚障害等の徴候及び本品の破れ・浮き等があるかどうか確認するため毎日観察してください。●本品の使用により、感染症及び皮膚障害(発疹・発赤・かゆみ等)と思われる症状があらわれた場合は、使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。●救急絆創膏にかぶれやすい方は、注意して使用してください。●皮膚の弱い方は同じところに繰り返し貼らないでください。●滅菌効果が損なわれますので、滅菌袋は使用時に開封してください。●包装が破損または汚損している場合は、滅菌効果が損なわれますので使用しないでください。●剥がす際は、皮膚障害を防ぐため、皮膚を押さえながらゆっくり剥がしてください。●粘着面を患部に貼らないでください。●パッド部分が濡れたり、汚れたままにしておくと傷の治りがわるくなる場合がありますので貼り替えてください。●小児に使用させる場合は、保護者の指導監督のもとに使用してください。

【保管方法】●直射日光が当たらない湿気の少ない、涼しい所に保管してください。●小児の手の届かない所に保管してください。

【ゼロ感覚フィルムドレッシング 注釈】ゼロ感覚とはまるでテープを貼っていないかのような感覚を意味しています。ただし感覚には個人差があります。

使用する分だけカットできる 未滅菌・ロールタイプ

超・ゼロ感覚フィルムドレッシング

エアウォール

fu wa ri



超低刺激《ふわりゲル》と、ゼロ感覚《エアウォール・フィルム》で、
肌にふわりとやさしく、かぶれにくい。

超低刺激・密着ゲル

ふわりゲル

- ☒ 滑らかにはがれて、角質剥離が起きにくい。
- ☒ しっとりやさしく、肌に密着。

“ゼロ感覚”極薄フィルム

エアウォール・フィルム

- ☒ ムレも、つぶれも、はがれも気にならない。
- ☒ 貼っていることを忘れるほどの快適さ。

※ロールタイプの「エアウォールふ・わ・り」は、医療機器ではありません。

テープが医療にできること、もっと。

skinix
www.skinix.jp

株式会社 共和 メディカルグループ

大阪本社:〒557-0051 大阪市西成区備 3-20-28
TEL:06-6658-8217
FAX:06-6658-8101

東京本社:〒135-0016 東京都江東区東陽 5-29-16
TEL:03-5634-3843
FAX:03-5634-3845