


# 自宅でプロの傷あと\*ケアを再現!

アトレスケアは伸ばして貼るだけ!  
自分でいつでも手軽に傷あと\*ケアを実現できます。

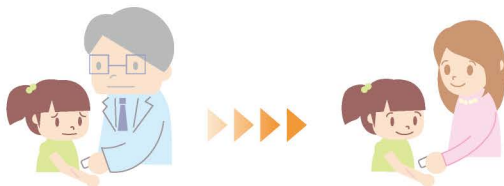

## 自分で積極的に傷あと\*ケアする時代へ

テープを伸ばし、傷あとに当てて貼るだけ。自宅でプロの処置を再現できるように、テープの構造や手順にこだわりました。貼り替えも自分でできるので、長期間の傷あとケアもストレスなく、快適に続けられます。

## 特長1 傷あと\*だけに『寄せる力』を加える


伸ばしたテープの縮む力を利用して、  
広がろうとする傷あと\*に  
ピンポイントに寄せる力を加えます。

中央だけが均一に縮むから、  
『寄せる力』が傷あと\*だけに!



テープを左右にひっぱると、  
切り込み部分だけが凸凹状に均一に伸びます。  
そのまま傷あとに貼ることで、  
傷あと部分だけ、  
ピンポイントにテープが縮みます。

傷あと周辺部は、  
皮膚トラブルが起きにくい!

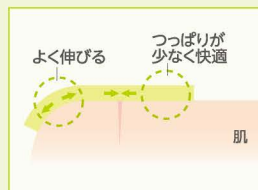

テープを貼っている傷あと以外の部分や  
肌の凹凸・曲面部分には  
やわらかくフィットし、つっぱりません。  
テープはとても肌になじみやすいので、  
皮膚トラブルが起きにくいです。

## よくあるご質問

- Q アトレスケアはどこに使うのですか?  
A 縫合した傷の抜糸後すぐの傷あと\*にご使用いただけます。その際、  
滲出液や血液が出ていれば、ご使用をお控えください。
- Q どのくらいで交換したらいいですか?  
A 2~3日に1回を目安に交換してください。はがれてきたら、貼りかえ時  
です。
- Q 傷あとがテープよりも大きい場合はどうしたら良いですか?  
A 右図のようにテープは隙間を空けずに、少しでも  
重なるようにして貼り、傷あと\*の長さに合わせた  
枚数を使用してください。
- Q テープを貼ったまま、お風呂に入ってもはがれませんか?  
A アトレスケアは防水性があります。そのため貼ったままでの入浴や  
シャワー浴が可能です。
- Q アトレスケアはどうやってはがせば良いですか?  
A テープのふちを優しくこすり、めくる部分を作  
ります。傷あと\*に刺激を与えないよう、やさし  
くゆっくりはがしてください。



## アトレスケア規格表

※販売希望小売価格には、消費税は含まれておりません。

| 規格     | サイズ       | 品名コード      | 販売希望<br>小売価格 | 入数  |
|--------|-----------|------------|--------------|-----|
| No.S10 | 25mm×50mm | YB-Q2550S1 | 980円         | 10枚 |
| No.S30 | 25mm×50mm | YB-Q2550S  | 2,700円       | 30枚 |
| No.M10 | 50mm×50mm | YB-Q5050S1 | 1,980円       | 10枚 |
| No.M30 | 50mm×50mm | YB-Q5050S  | 5,400円       | 30枚 |

用途: 抜糸後の傷あと\*の被覆保護

## 製品のご購入

アトレスケア

検索

テープが医療にできること、もっと。

**skinix®**

www.skinix.jp

株式会社 共和 メディカルグループ  
大阪本社 〒557-0051 大阪市西成区橋3-20-28  
TEL: 06-6658-8217  
東京本社 〒113-0016 東京都江東区東陽5-29-16  
TEL: 03-5634-3843

【使用上の注意】●アトレスケアは抜糸後の傷あと\*  
に使用する未滅菌のテープです。直接創部に貼らない  
でください。●安全にお使い頂くため、アトレスケアの  
使用に際しては、必ず医師の指示に従ってください。●  
本品の使用により、発疹・発赤・かゆみ・水疱等があら  
われた場合には、使用を中止し、医師または薬剤師に  
相談してください。●貼付部分の水分や汚れはよく拭  
き取り、清潔にしてください。水気があるとつきにくい  
場合があります。●油分の多い部位に貼るとはがれ  
やすいため、顔や頭部に貼る場合は注意して使用して  
ください。●テープ部のはがれ・浮き等がないよう貼  
付してください。また、観察時にそれらが発見された場  
合には、貼りかえてください。●関節等に使用する場  
合は、皮膚を伸ばした状態で使用してください。(医師か  
ら具体的な指示がある場合はその指示に従ってくだ  
さい。)●救急絆創膏にかぶれやすい方は、注意して使  
用してください。●アトレスケアは伸縮性のある商品で  
すが、引っ張りすぎるとテープが破れたり、ちぎれたりす  
る場合がありますので注意して使用してください。  
●傷あとの長さにあわせて枚数を使用してください。  
【保管方法】●直射日光を避け、湿気の少ない涼しい  
所で保管してください。●小児の手の届かないところ  
に保管してください。  
【テープ交換の目安】2~3日に一回を目安に交換して  
ください。はがれてきたら貼りかえ時です。  
【★注意】傷あととは滲出液や血液などがなく、  
創面がふさがっている状態のことを指します。

ZZ016 24.11-00,000 第6版

skinix®

気になる傷あと、どうしていますか?  
抜糸後からはじめる、  
“本格”傷あとケア。

傷あとケア専用テープ

アトレスケア

Sサイズ



Mサイズ



www.skinix.jp

積極的にはじめる、傷あとケア専用テープ

# アトレスケア 誕生。

抜糸後の傷あと、  
気になるなあ。

帝王切開の傷あとって  
どうなるんだろう…。

抜糸した後、  
ケロイドにならないかしら？

「抜糸も終わって、傷はふさがったけれど…」  
傷が癒えたあとも、心配や不安は残ります。

そこで新たに誕生したのが、  
傷あとケア専用テープ“アトレスケア”。

寄せる力を加えることで、傷あと\*は広がりにくく、  
革新的な傷あとケアを実現できます。

**特長1** 傷あと\*だけに『寄せる力』を加える

**特長2** まるで貼っていないような感覚

アトレスケアで先進の傷あとケアを。


安全にお使いいただくため、使用に際しては必ず医師の指示に従ってください。

## 特長2 まるで貼っていないような感覚

先進の医療用テープ“アトレスケア”は、透明でわずか0.007mmの薄さ！  
髪の毛と比べると、約1/20の薄さで、ムレ・つぶりがほとんどありません。  
そんな肌への優しさを極限まで追求した、快適な透明のテープです。  
貼っていることを忘れるほどの自然な貼りごちを実現しました。


汗をかいてもムレない！

従来の自社テープ

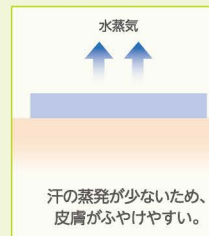

汗の蒸発が少ないため、  
皮膚がふやけやすい。

アトレスケア

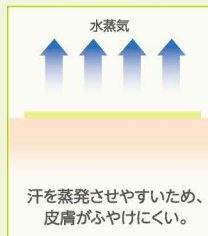

汗を蒸発させやすいため、  
皮膚がふやけにくい。

水蒸気透過性が非常に高く、  
汗の蒸発を妨げないので、  
長時間貼っていても  
ムレによるかゆみや  
不快感がほとんどありません。

水蒸気透過量が約**4倍**！  
テープを透過する水蒸気量の差(24時間1㎡当たり)

伸縮性があるからつぶらない！

従来の自社テープ アトレスケア



驚きの  
伸び率

伸縮性に優れているため、  
動きに沿ってしなやかに伸び縮みし、  
皮膚ストレスを軽減します。  
水ぶくれや赤みなど皮膚トラブルの原因となる、  
肌の固定やつっぱり感から開放します。

伸び率の差が約**15倍**！  
同重量のおもりを吊るした時の伸び率の差

※当社比


## 貼り方手順

※傷から血液等が出ていないことをご確認ください。

### ■両手貼り



裏の白い紙(大きい方)を  
途中まではがします。

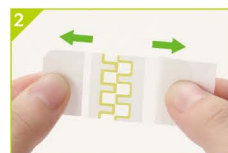


テープを表返し、両手で左  
右の凸の切り口が綺麗に揃  
うまで徐々に引っ張ります。



テープ中央に傷あと\*を合  
わせ、引っ張ったままっか  
り貼ります。



白い紙を全てはがし、上か  
ら押さえ、テープを端まで  
しっかり貼ります。

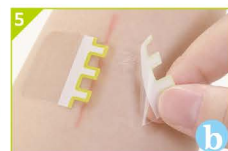

表の透明なフィルムをゆっく  
りはがします。



最後にテープを肌になじま  
せて、完成です。テープは透  
明なので目立ちません。

### ■片手貼り



裏の白い紙(小さい方)をは  
がします。



テープを傷あと\*に合わせ、  
①ではがした部分を貼りま  
す。



裏の白い紙(大きい方)を途  
中まではがします。



②で貼ったところを押さえ、  
他の指で反対側の端をつま  
んで引っ張ったまま、っか  
り貼ります。




残りの白い紙を全てはがし、  
上から押さえ、テープは透  
明なフィルムをゆっくりは  
がします。




最後にテープを肌になじま  
せて、完成です。テープは透  
明なので目立ちません。

貼り方の  
コツ


a b c

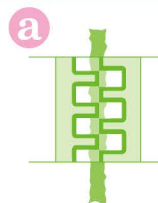

左右の凸の切り口が綺麗に  
揃うまで引っ張ります。  
テープの中心と傷が重なる  
ようにして、伸ばした状態  
で貼ります。

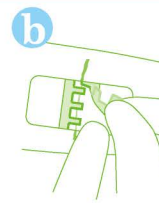

透明なフィルムをはがす時は  
貼っているテープがはがれ  
ないように、テープを押さ  
えながら、ゆっくりはがし  
ます。特にテープの周囲は、注  
意しながらはがします。

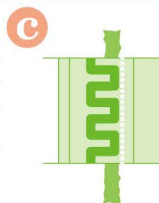

テープを貼るときに、図のよ  
うに合わせるとテープを伸  
ばして貼るときに傷あと\*が  
中央にきます。