

不快感はさまざまなトラブルの入り口！



不快感は抜去の一因というだけでなく、患者さんのQOL低下や、治療意欲の減退、ひいては不信任にまで発展しかねません。
小さなことと見逃さず、発生する前にきちんと対策しましょう。

器具の痛みにもしっかり対処を！「ココロール カテ用」

フィルムの不快感を解消したら、器具（ロック部分）の圧迫による不快感や痛みにも、「ココロール カテ用」でぜひ対処を。ロック部分の下にサッと貼るだけで、圧迫を分散して痛みを起きにくくし、MDRPU（医療関連機器褥瘡）リスクも軽減します。



エアウォールIV規格表

販売名：エアウォールIV 切り込みタイプV／一般医療機器 救急絆創膏／届出番号：27B2X00038000027

品名	規格	サイズ	品名コード	個装			外装	
				販売希望 小売価格	入数	JAN [4971620]	ケース	GTIN [14971620]
切り込みタイプ 滅菌済医療機器	No.6080V	60mm×80mm	YB-216080V	13,500円	100枚	861110	10箱	861117
	No.9010V	90mm×100mm	YB-219010V	8,000円	50枚	861103	10箱	861100



No.6080V

販売名：エアウォールIV レギュラータイプ／一般医療機器 救急絆創膏／届出番号：27B2X00038000016

品名	規格	サイズ	品名コード	個装			外装	
				販売希望 小売価格	入数	JAN [4971620]	ケース	GTIN [14971620]
レギュラータイプ 滅菌済医療機器	No.4050R	40mm×50mm	YB-214050R	5,200円	100枚	860656	10箱	860653
	No.6070R	60mm×70mm	YB-216070R	5,800円	100枚	860663	10箱	860660
	No.6090R	60mm×90mm	YB-216090R	7,000円	100枚	860694	10箱	860691
	No.8010R	80mm×100mm	YB-218010R	5,600円	50枚	860687	10箱	860684
	No.1012R	100mm×120mm	YB-211012R	7,500円	50枚	860670	10箱	860677



No.6070R

販売名：エアウォールIV フレームタイプ／一般医療機器 救急絆創膏／届出番号：27B2X00038000015

品名	規格	サイズ	品名コード	個装			外装	
				販売希望 小売価格	入数	JAN [4971620]	ケース	GTIN [14971620]
フレームタイプ 滅菌済医療機器	No.70F	70mm×60mm	YB-21070F	12,000円	100枚	860526	10箱	860523
	No.120F	120mm×100mm	YB-21120F	7,000円	50枚	860533	10箱	860530



No.70F

※販売希望小売価格には、消費税は含まれておりません。

使用目的または効果 ● 創傷面の保護

【使用上の注意】

●穿刺部から滲出液や出血が見られる場合は使用しないでください。●明らかに感染を有している部位には使用しないでください。●使用部位とそのまわりを清潔にし、水気をよく取って使用してください。水気があるとつきにくい場合があります。●貼付部位は感染症・皮膚障害等の徴候及び本品の破れ・浮き等があるかどうか確認するため毎日観察してください。●本品の使用により、感染症及び皮膚障害（発疹・発赤・かゆみ等）と思われる症状があらわれた場合は、使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。●救急絆創膏にかぶれやすい方は、注意して使用してください。●皮膚の弱い方は同じところに繰り返し貼らないでください。●滅菌効果が損なわれますので、滅菌袋は使用時に開封してください。●包装が破損または汚損している場合は、滅菌効果が損なわれますので使用しないでください。●剥がす際は、皮膚障害やカテーテルの抜去を防ぐため、皮膚やカテーテルを押さえながらゆっくり剥がしてください。

【保管方法】

●直射日光が当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。●小児の手の届かない所に保管してください。

【ゼロ感覚フィルムドレッシング 注釈★】ゼロ感覚とはまるでテープを貼っていないかのような感覚を意味しています。ただし感覚には個人差があります。

テープが医療にできること、もっと。

skinix®
www.skinix.jp

株式会社 共和
メディカルグループ

大阪本社
〒557-0051 大阪市西成区橋 3-20-28
TEL: 06-6658-8217
東京本社
〒135-0016 東京都江東区東陽 5-29-16
TEL: 03-5634-3843

ゼロ感覚フィルムドレッシング

エアウォール
IV AIR WALL

カテーテルの“2大トラブル”感染と抜去に 本気で向き合う

エアウォールIV



薄さ7 μ mの
極薄フィルムで実現



“2大トラブル”のもと、発生していませんか？

感染のもと



小さなスキマから侵入
細菌は小さなスキマからも容易に入り込みます。この侵入ルートが危険です。



ムレで菌が増殖
意外に気づきにくい刺入部まわりのムレ。少しの汗でも、小さな空間の湿度は急に上がります。

抜去のもと



一瞬、強い力がかかる
うっかり引っかけて抜去すると、治療に影響が出たり再刺入の手間もかかります。



患者さんが引っかく
睡眠中やせん妄の患者さんが無意識に起こす抜去は、フィルムの不快感なども大きな原因です。

感染を原因から徹底的に見直し

しっかり消毒していても起こる、感染。

その原因となるのが、菌の侵入ルートとなるスキマと、菌の増殖につながるムレです。

このスキマとムレに、エアウォールIVは、極薄フィルムだからこそその力を発揮します。

菌が侵入する「スキマ」を作らせない

菌が侵入しやすいのは、以下の大きなスキマです。

- ・ロック部分周辺のウキ(空間)
- ・フィルムの貼りジワ
- ・時間とともにできるフィルムのヨレ

エアウォールIVは、やわらかな極薄フィルムがスキマなく密着し、菌の侵入をブロックします。



意外に多いスキマ
シワ
シワ
ウキ
いろんなスキマが菌の侵入口に

スキマなくフィット
エアウォールIV
菌の侵入口がでにくい
(当社比)


菌の増殖につながる「ムレ」を抑える

フィルムの水蒸気透過性はとても重要です。

汗の蒸発をフィルムが妨げると刺入部周辺の湿度が高まり、菌の増殖の原因になりかねません。

非常に高い水蒸気透過性を持つエアウォールIVは、汗をどんどん逃してムレの危険を徹底的に抑えます。

【実験】水を入れた容器をフィルムで密閉し、39℃で2時間放置。フィルムの状態を撮影。

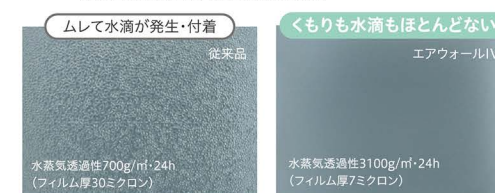

ムレて水滴が発生・付着
従来品
水蒸気透過性700g/m²・24h
(フィルム厚30ミクロン)

くもりも水滴もほとんどない
エアウォールIV
水蒸気透過性3100g/m²・24h
(フィルム厚7ミクロン)

多湿が感染リスクを高める


汗を逃してほとんどムレない
(当社比)

抜去のジレンマをゼロ感覚*フィルムが解消

「抜去を起こしたくないから、ガッチリ固定しなきゃ」と、必要以上に固定すると、肌の不快感も増えて、患者さんが引っかくなど、結果的に抜去の原因を増やすことに…。ゼロ感覚*フィルムのエアウォールIVが、そんなジレンマを解消します。


しっかり固定さえすれば、 抜去は本当に減る？

抜去が不安だからと、つい多く貼りがちな不織布テープ。でも、ゴワつきの大きい不織布は不快感も大きくします。そしてその不快感、抜去の見えない一因ともなっていました。固定か、快適さか…。今まではそれがジレンマでした。

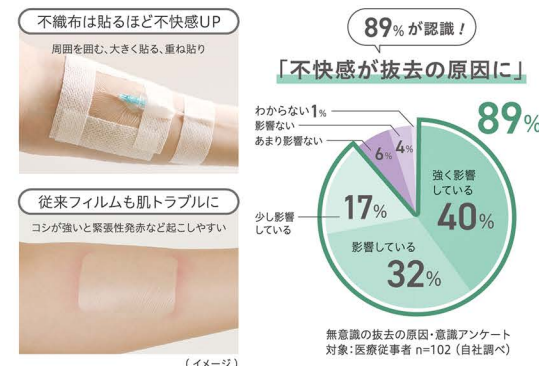

「適材適所」という新たな考え方で、 抜去を最小限に。

エアウォールIVの極薄・ゼロ感覚*フィルムは、不快感がほとんどなく器具の凸凹にもぴったり貼りついて、器具をしっかりホルドします。実は固定力に関わる部分は意外に小さく、あとは快適さが大切。エアウォールIVはこの「適材適所」という新たな考え方で、抜去リスクを最小限に抑えます。

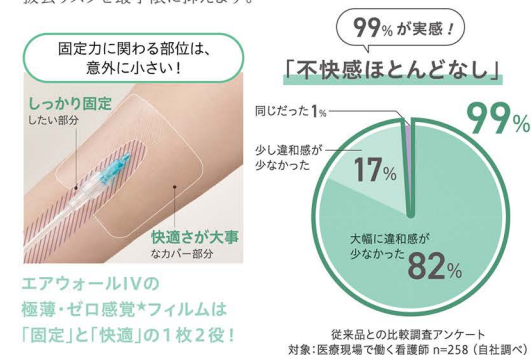

★ゼロ感覚とはまるでテープを貼っていないかのような感覚を意味しています。ただし感覚には個人差があります。

※フィルム以外でできる抜去予防としては、ルートをきちんと固定することが大切です。

極薄

「エアウォールフィルム」とは？

貼っていることを忘れる 「ゼロ感覚*」フィルム

従来フィルムより格段に薄く、わずか7ミクロン(0.007mm)の極薄フィルム。卵の薄皮の約1/10という薄さだからこそ、ムレ・つっぱり・はがれが格段に起きにくく、感染と抜去到新たな解決策を提供します。

肌のキメにまでやわらかな感じで、貼っている違和感がほとんどない「ゼロ感覚*」フィルムです。

従来品と格段に違う高機能性

●フィルム厚 約1/4 以下*

だから、高い水蒸気透過性としなやかなフィット性を実現。感染と抜去への対策にいま不可欠な、極薄フィルムです。(薄くても水や菌のブロック性能は従来品と変わりません。)



●水蒸気透過性 約4倍*! (24時間1m²当たり)

医療用フィルム最高レベルの3100g/m²・24hの水蒸気透過性。汗などの水分をどんどん放出し、菌の増殖要因を減らします。患者さんも快適なサラサラ肌が続きます。

●伸び率 約15倍*!

薄い分しなやかによく伸びて、器具の細かな凹凸にもフィット。器具の動きや肌の伸縮・ねじれにもしっかり追従し、ウキやはがれが起きにくい。

(※当社比)

＼教育にも便利／ WEBで上手な貼り方・使い方を紹介！



<https://www.skinix.jp/wisdom/howto/>

貼る目的や場所に応じて、**3タイプ9サイズ** から最適な1枚をチョイス！

カテーテルを挟み込んでホールド。 抜ける力に最も強い。(3タイプ中)

切り込みタイプ


固定力を高めたい部分には、最小限の不織布を。
他はゼロ感覚*フィルムで、適材適所。

抜去リスクを軽減

不快感や肌トラブルの一因となる不織布を必要最小限に抑え、抜去リスクに配慮しました。

不織布テープでルート固定も

滅菌済みの不織布テープがついてルート固定まで全て完了。他のテープを用意する手間が省け効率的です。

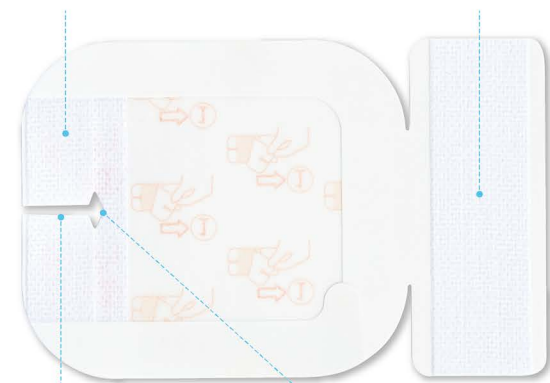

スリット入りで しっかりホールド

スリットの根元が刺入部を包み込み、両端が軽く重なる構造なので、強い力にも抜去しにくい。



※ スリットの両側がカテーテル下で自然に少し重なります。無理に大きく重ねようと引っばると、肌にストレスがかかり肌トラブルの原因になるので注意。

ひし形ホールが ぴったり密着

実はひし形は、円柱形の器具にスキマなく貼りつく形。穴の形ひとつにも菌の侵入を阻止する工夫が。



2サイズ(No.6080V / No.9010V)

使用例

末梢静脈カテーテル



腕に
(No.6080V)

中心静脈カテーテル



内頸に
(No.9010V)



鎖骨下に
(No.9010V)

ゼロ感覚*フィルムとゲル粘着剤で、 快適さを極めました。

レギュラータイプ

ゲル粘着剤のやさしさがプラスされ、
抜去の原因となる不快感を徹底排除。




裏面に貼り方 イラスト付き

手順を見ながら
カンタンに貼れます。

肌にやさしいゲル粘着剤

skinixが特殊開発した超低刺激のゲル状の粘着剤。ゲルの密着力で肌の繊細な凹凸にもぴったり密着し、菌の侵入を防ぎます。はがすときも角質剥離が大幅に軽減され、繰り返しの貼り替えにも肌トラブルの心配がほとんどありません。

はがしたテープに付着した角質を紫色に染色

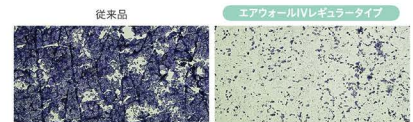

※角質剥離量には個人差があります(当社比)

5サイズ(No.4050R / No.6070R / No.6090R / No.8010R / No.1012R)

使用例

末梢静脈カテーテル



大人の腕に
(No.6070R)



小児に
(No.4050R)

中心静脈カテーテル



鎖骨下に
(No.1012R)

刺入部を見ながら的確に貼れます。 フィット感も固定力もアップ。

フレームタイプ

フィルム窓から見ながら、器具の凹凸にしっかりフィット。
固定力がアップし、フィルム端のシワも防ぎます。

大きな窓で 刺入部を見ながら貼れる

窓から位置や貼りつきを確認しながら貼れる。ぴったり押さえられるので、細かい凹凸にもしっかり貼れ、固定力アップ。



フレームで 端までシワなく貼れる

最後にまわりのフレームをクルリとはがして、貼り付け完了。フィルムの端にシワが出にくく、菌の侵入経路を極力できにくくします。

ガイドスリット

貼り付け位置の目安。ロック部分も沿わせやすい。(まわりのフレームをはがすとき、ここを手でちぎります。)

2サイズ(No.70F / No.120F)

使用例

末梢静脈カテーテル



高齢者など凹凸のある手背に
(No.70F)

中心静脈カテーテル



CVポート用ヒューバー針に
(No.120F)