

ほぼテープ貼り方

テープは上下逆さでも使えます。
 ほぼの大きさや肌の状態にあわせて使い分けてください。


1

真ん中と大きい方の紙をはがします。



2


大きい方をほぼの上側へ貼り付けます。

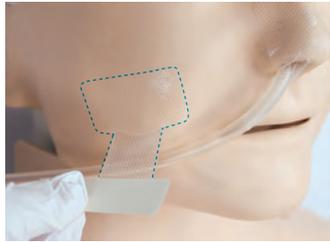

3


小さい四角の部分を上まで折り返すように持ち上げ、ブリッジ部分にチューブを乗せます。

通常のチューブ(16Fr)の場合

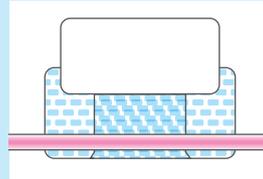

ブリッジ部分の下側にチューブを乗せます。

細いチューブ(8Fr)の場合

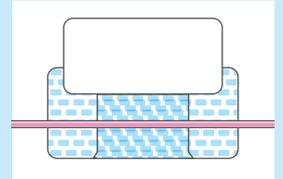

ブリッジ部分の真ん中にチューブを乗せます。


4

テープをおろし、テープ同士を貼り合わせます。(オメガ貼り)




5

残りの紙をはがし、肌へしっかり貼り付けて完成です。

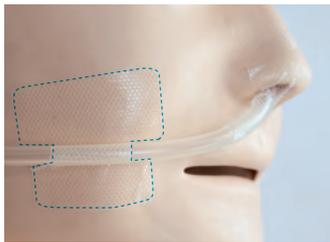

Point

オメガ(Ω)貼り

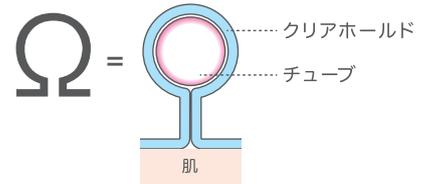

チューブを浮かせたまま固定でき、ひっぱられてもテープがはがれにくく、肌への摩擦や圧迫も緩和できます。

はがし方

はがすときは、肌と平行に引っ張りながらゆっくりはがします。肌の負担が少なく、やさしくはがせます。



Point


チューブからテープをはがすときは…

片手でチューブをもち、もう一方の手でつまみを持って、下から上へテープをほどくようにはがします。



注意

上から下に引っばると、チューブが抜けるおそれがあります。

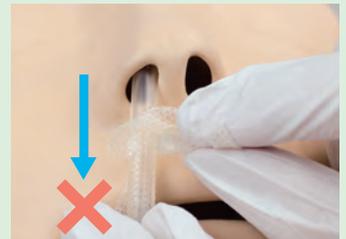

テープが医療にできること、もっと。

skinix®
 www.skinix.jp

株式会社 共和 メディカルグループ
 大阪本社: 〒557-0051 大阪市西成区橋3-20-28
 TEL: 06-6658-8217
 FAX: 06-6658-8101
 東京支店: 〒135-0016 東京都江東区東陽5-29-16
 TEL: 03-5634-3843
 FAX: 03-5634-3845
 札幌・仙台・名古屋・熊本



貼り方ガイド
 動画配信中
 ◀詳しくはコチラ

経鼻チューブ 固定方法 検索

はなテープ貼り方

Point

皮膚の汚れをしっかりと拭き取ることが、
長持ちのコツ！





清拭方法

- ① 界面活性剤を含んだ洗浄剤を使用する(石鹸など)
- ② オイル成分を含む洗浄剤を使用する(洗浄用クリーム剤など)
- ③ 油とりフィルムを使用する


鼻翼を保護できる

チューブの接触・圧迫は潰瘍の原因になります。鼻翼から離して固定してください。薄くて柔らかいクリアホールドはチューブを思った位置に固定できます。

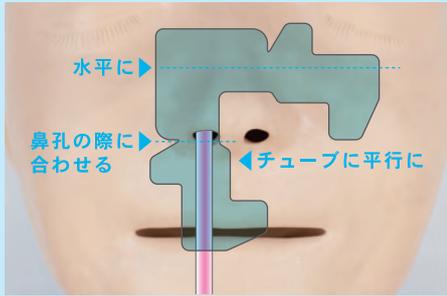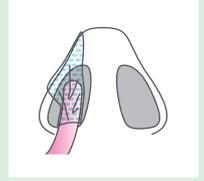

貼る前に、テープを貼る位置を確認します。

90度回転させることで、左右どちら側のチューブでも固定することができます。

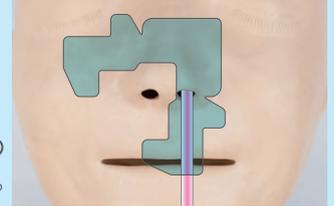

1

真ん中の部分の紙をはがし、先ほど確認した位置へ貼り付けます。




2

鼻側の紙をはがし、肌へ貼り付けます。



3

チューブ側の紙をはがします。まだチューブへ貼り付けないでください。

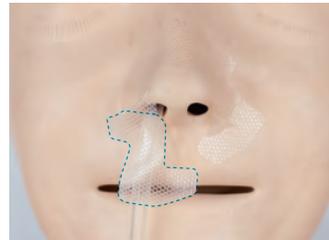


4

テープを鼻翼に押し込むように貼り付けます。チューブが鼻翼の側面にあたらないよう、位置を調整します。




5

テープのでっぱりを折り曲げ、つまみを作っておくと、はがしやすくなります。

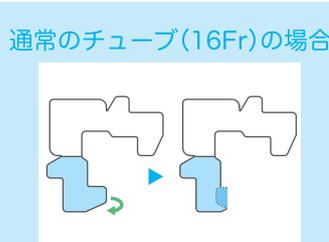


通常のチューブ(16Fr)の場合
下側のでっぱりを折り曲げます。

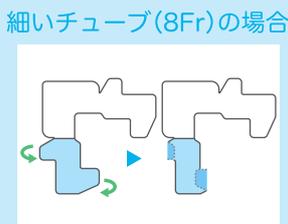

細いチューブ(8Fr)の場合
両方のでっぱりを折り曲げます。

6

チューブへ貼り付け、固定して完成です。

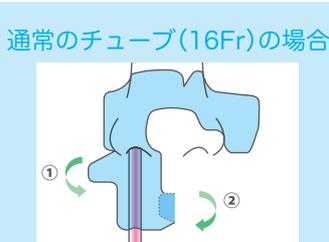

通常のチューブ(16Fr)の場合
鼻に近いでっぱりから順に貼り付けます。



細いチューブ(8Fr)の場合
折りたたむようにつまみ軽く貼り合わせます。



鼻翼など潰瘍がしやすい箇所は、毎日観察を行ってください。異常がない場合は、3~4日*を目安に貼り替えてください。

*貼り替え期間はあくまで目安です。皮脂・汗の分泌量また体毛などによって患者様ごとに貼り替え期間は異なります。