


ムレに、サヨナラ。
はがれに、サヨナラ。
つぶりに、サヨナラ。

【こけしカット】で貼りづらい指先もキレイに貼れる

『指』に貼ってみよう

使用材料 … エアウォール100mm幅 30~50mm程度

カット方法 ※あくまで一例です。
サイズは患者様にあわせて調整してください。

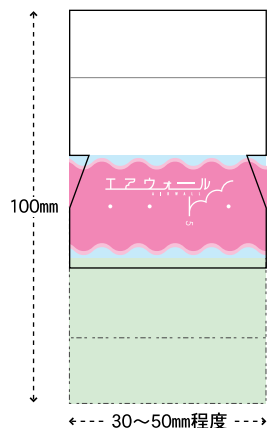

✂ 黒の実線でカットする

✂ 5mm程度の切込みを入れる

✂ ピンクの固定テープの真ん中から斜めに山形カット


貼り方




1 剥離紙の大きい方を剥がします。



2 指先を切り込み部分よりやや下辺りにあわせ、指の側面に巻き付けるように貼り付けます。このとき必ず爪側へ貼り付けてください。

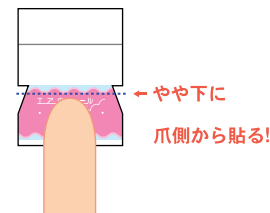

3 上側のテープを倒します。上側のサイドはまだ巻き付けません。

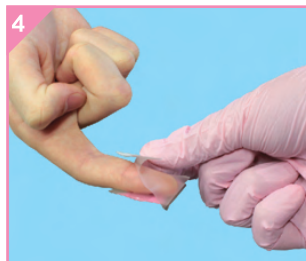

4 残った剥離紙を剥がします。



5 指をかえして、ピンクの固定テープを指先から下方へ剥がします。



6 のこった透明フィルムの上部分のみ剥がします。



7 透明フィルムを剥がした指先部分は少しテープが浮いていますので、そこを軽く抑えるときれいに仕上がります。



8 残りの指の腹側のテープをフィルムを付けたまま巻きつけます。このとき、先に指先の角から折り込むようにして貼り付けるときれいに仕上がります。



9 透明フィルムをすべて剥がしてください。



10 完成

skinix®

株式会社 共和 www.skinix.jp
大阪本社 〒557-0051 大阪市西成区橘3-20-28
東京支店 〒135-0016 東京都江東区東陽5-29-16
営業所:札幌・仙台・名古屋・福岡 出張所:熊本

お問い合わせ先
メディカルグループまで
大阪 TEL:06-6658-8217 FAX:06-6658-8101
東京 TEL:03-5634-3843 FAX:03-5634-3845


ムレに、サヨナラ。
はがれに、サヨナラ。
つっぱりに、サヨナラ。

【ちょうちょうカット】で関節部位もキレイに貼れる

『肘』に貼ってみよう


使用材料…エアウォール100mm幅 150mm程度

カット方法 ※あくまで一例です。
サイズは患者様にあわせて調整してください。

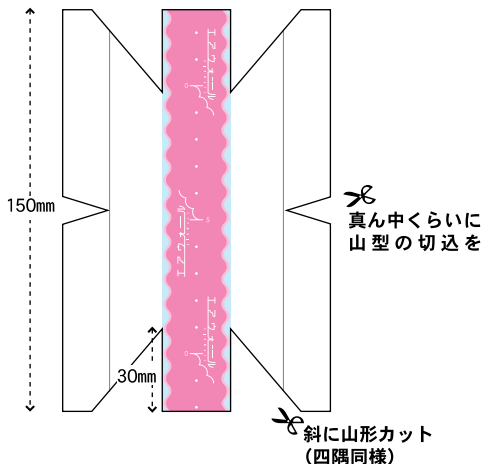

☆『かかと』や『膝』等への貼付にもご利用できます。

貼り方

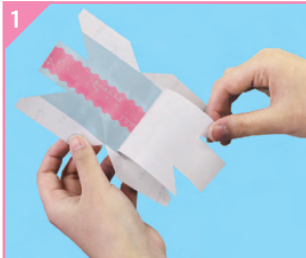

中央の剥離紙のみ剥がします。



肘は伸ばした状態にしてテープの両端を持ち、軽く引っ張りながら貼りつけてください。

☆貼りつける際は、真ん中のピンク色のテープ部分から、両端に向けてエアを抜くよう貼るときれいに貼れます。



持ち手となっていた両端の剥離紙を剥がし貼りつけます。



ピンク色の固定テープをゆっくりと剥がしてください。



残った透明フィルムを両側にゆっくり剥がしてください。




完成

【大の字カット】で凸凹の多い仙骨部もキレイに貼れる

『仙骨部』に貼ってみよう

使用材料…エアウォール150mm幅 130~150mm程度


カット方法 ※あくまで一例です。
サイズは患者様にあわせて調整してください。

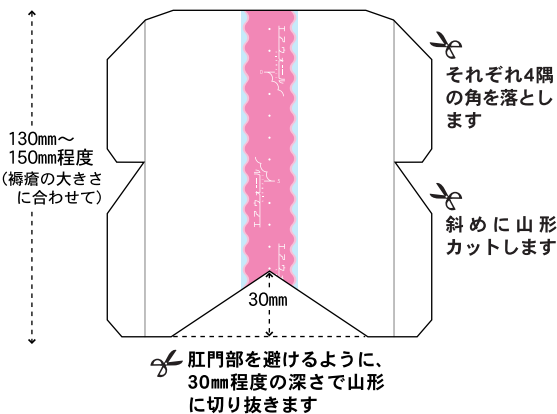

貼り方




中央の剥離紙を剥がし、両端をもって褥瘡箇所に貼り付けます。

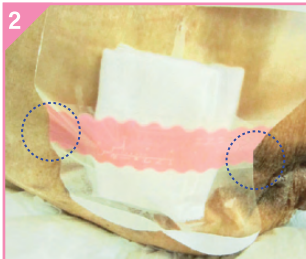

頭側と肛門側はフィルムの浮きが生じやすいため、押さえながら貼るようにすると隙間なく貼付できます。





両端の剥離紙を剥がします。

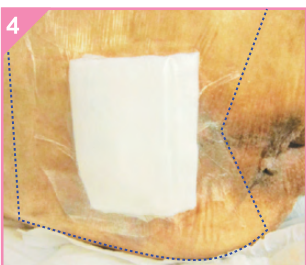

ピンク色の固定テープをつまんで透明フィルムを左右に剥がし、完成です。



さらに、排泄物による汚染をより確実に防ぐため、エアウォールを30mm幅程度にカットし図のように端貼りをします。

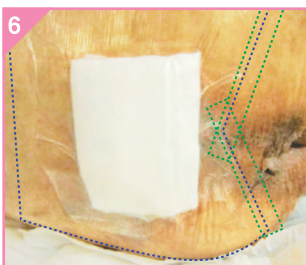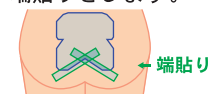

完成

ムレに、サヨナラ。
はがれに、サヨナラ。
つぶりに、サヨナラ。


【だるまカット】で貼りにくい踵にもキレイに貼れる

かかと

『かかと』に貼ってみよう

使用材料…エアウォール100mm幅 150~200mm程度

カット方法 ※あくまで一例です。
サイズは患者様に合わせて調整してください。

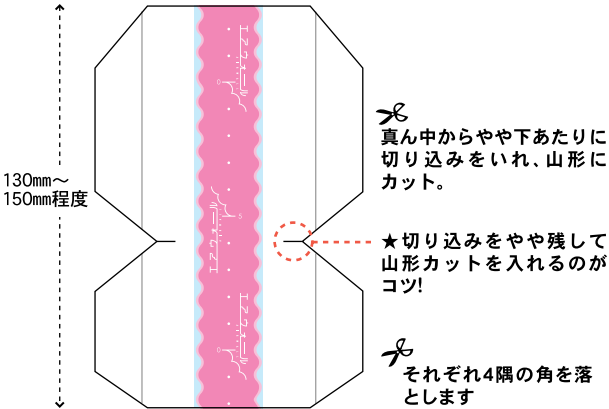

1 剥離紙を、上半分の両端のみ残して全て剥がします。



2 切れ込み部分を足の裏へのカーブ部分に合わせて貼り付けます。




3 先にかかとを覆うように下半分を貼り付けます。上半分はまだ貼り付けないでください。



4 中心のピンク色のテープを先にゆっくり剥がします。



5 ピンク色のテープをはがすと透明フィルムに切れ込みが入っているので、かかとに貼り付けた下半分だけ左右にはがします。

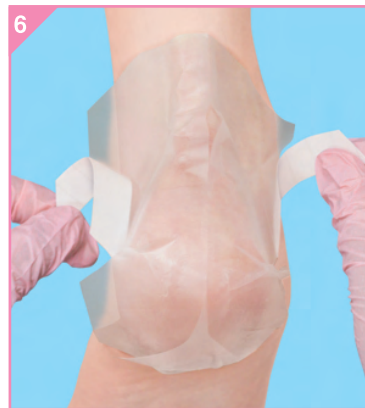

6 上半分の部分に残った剥離紙をはがし、中心から空気を抜くように貼り付けます。



7 残った透明フィルムをゆっくりとはがします。はがしたあと、テープが肌に馴染むよう軽く全体を押えてください。



8 完成

skinix®

株式会社 共和 www.skinix.jp

大阪本社 〒557-0051 大阪市西成区橘3-20-28

東京支店 〒135-0016 東京都江東区東陽5-29-16

営業所:札幌・仙台・名古屋・福岡 出張所:熊本

お問い合わせ先

メディカルグループまで

大阪 TEL:06-6658-8217

FAX:06-6658-8101

東京 TEL:03-5634-3843

FAX:03-5634-3845