

尿道カテーテル・ドレーン固定テープ

クリアホルド ライナー

尿道カテーテルやドレーンの固定に。

抜去も 肌トラブルも


クリアホールド ライナーで対策!



現場の悩みや問題の発生メカニズム

抜去や内部の炎症・感染

抜去

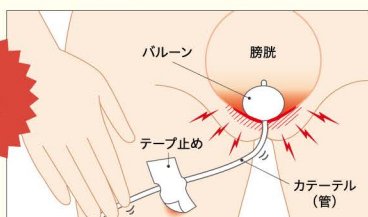

テープ固定が甘くチューブが動くと、バルーンが膀胱内に当たり炎症に。ドレーンの抜去も深刻な問題になります。

緊張性発赤

**肌
トラブル**



テープが硬い(伸びが悪い)と、周囲の皮膚を引っ張り、発赤や水疱が。

かぶれ



ムレやすいテープ素材や刺激の強い粘着剤などで肌トラブルが発生。

問題発生メカニズムに着目した、新発想 **ライナー構造**。 現場の悩みに応えるさまざまな工夫も。

ライナー構造

伸びない不織布と、伸びの良いウレタンフィルム、
2種類の素材を適材適所で使い分けた、新発想のライナー（内張り）構造です。

【不織布】パート

伸びない不織布でチューブを
しっかりホールドし、オメガ留めも安定。
肌への貼り付き部分は最小限にし、
肌負担を回避します。

【快適フィルム】パート

肌トラブルに最大限配慮した、
柔らかく快適なフィルム。
肌の伸び縮みにもしなやかに追従し
肌トラブルを起こしにくい。

ハガレに強い二重ロック

大きな力がかかる末端は、
二重ロックでしっかり固定。

クリアホールド ライナー



二重ロックと力の分散で、
抜けにくい

従来品



テープが簡単に持ち上がり
抜け・剥がれが起きやすい

理想的なオメガ留め


チューブが外れにくく、肌を圧迫や擦れから守る
オメガ(Ω)留めが、誰でもカンタンに。

クリアホールド ライナー



テープが全面に密着し
抜けにくい。肌をチューブの
圧迫や擦れから守る。


従来品

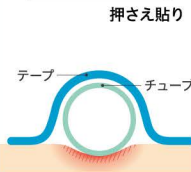


不安定で抜けやすい。
肌がチューブで擦られ
肌トラブルが起きやすい。

快適&安心メッシュフィルム

全方向によく伸びて、水蒸気透過性があり、
ムレにくく、透明・防水で安心。

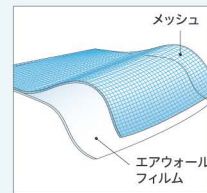

よく伸びてムレにくい
極薄「エアウォールフィルム」
をメッシュで補強

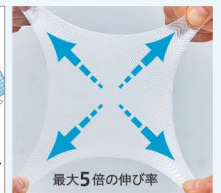

全方向によく伸び
肌の動きにやわらかく追従

しっかり固定

肌へのやさしさ

誰でもカンタンにオメガ(Ω)留め！

固定方法の統一がカンタンね！
現場への導入もスムーズだわ！

チューブを挟んで端を重ねるだけ。誰でも自然に&カンタンに、
高度なオメガ(Ω)留めができます。コツいらずで一度できれいに貼れて、現場の効率もアップ。



1. 片方を貼りつけて、




中央の剥離紙を剥がし、
広い面を片方だけ肌に貼ります。

2. チューブを当て、折り返し



テープ中央にチューブを当て、
折り返します。

3. 二重ロックを重ねると

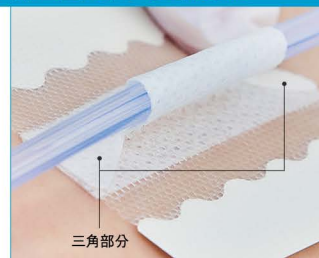

残ったテープの端の
三角(二重ロック部分)を重ねます。

4. 自然にオメガ留めが完成！



誰でもカンタンにオメガ留め。
両端を貼りつければ完了です。



経鼻チューブの固定には、クリアホールド

チューブの固定力と肌トラブルの悩みは、どの部位でも同じ。
特に肌が敏感で、汗や皮脂も多い鼻周りでも、
メッシュフィルムがやさしくしっかりチューブ固定する「クリアホールド」は
患者さんも看護師さんもうれしい、経鼻チューブの新定番です。



クリアホールド ※別売です。

尿道カテーテル・ドレーンチューブ固定用テープ

用途：尿道カテーテルや、ドレーンのチューブ部分の固定に

クリアホールドライナー規格表

品名	規格	サイズ	フレンチ数	品名コード	個装			外装	
					販売希望 小売価格	入数	JAN [4971620]	ケース	GTIN [14971620]
クリアホールド ライナー	M	55mm×72mm	20Fr以下用	YB-P20100T	7,000円	100枚	892244	18箱	892241
	L	70mm×90mm	26Fr以下用	YB-P26100T	9,000円	100枚	892251	12箱	892258

※標準希望小売価格には、消費税は含まれておりません。



M/55mm×72mm



L/70mm×90mm

【使用上の注意】

●本製品は、定められた範囲の医療用チューブ固定以外では使用しないでください。●本製品は、未滅菌ですので創部に直接貼付しないでください。●使用部位とそのまわりを清潔にし、水気をよく取って使用してください。水気があるとつきにくい場合があります。●明らかに感染を有している部位には使用しないでください。●固定力を保つため、テープ部のはがれ・浮き・シワ等がないよう貼付してください。また、観察時にそれらが発見された場合には、ただちに貼りかえてください。●本品の使用により、皮膚障害（発疹・発赤・かゆみ等）と思われる症状があらわれた場合には、使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。●固定したチューブが継続的に皮膚に接触・圧迫していると潰瘍となるおそれがあるため、使用中はよく観察を行い、適宜固定の位置や方向を変更してください。●救急絆創膏にかぶれやすい方は、注意して使用してください。

【保管方法】

●直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。●小児の手の届かない所に保管してください。

テープが医療にできること、もっと。

skinix
www.skinix.jp

株式会社 共和
メディカルグループ

大阪本社
〒557-0051 大阪市西成区橋3-20-28
TEL:06-6658-8217

東京本社
〒135-0016 東京都江東区東陽5-29-16
TEL:03-5634-3843