

Point

肌の汚れをしっかりと拭き取ることが、
長持ちのコツ!

清拭方法

- ①界面活性剤を含んだ洗浄剤を使用する(石鹸など)
- ②オイル成分を含む洗浄剤を使用する(洗浄用クリーム剤など)
- ③油とりフィルムを使用する



手順通り貼ることで、オメガ(Ω)留めが完成!



オメガ(Ω)留め

引っ張られてもテープがはがれにくく、チューブを浮かせたまま固定できるので、肌への摩擦や圧迫も緩和できる固定方法です。



貼り方

Mサイズを使用して説明しています。Lサイズも同様の貼り方です。

1

カテーテルの径から、
テープのサイズを
選択します。

20Fr以下
(外径6.7mm/0.263インチ以下)

↓

M
サイズ

26Fr以下
(外径8.7mm/0.341インチ以下)

↓

L
サイズ



中央の剥離紙をはがします。



テープの広い面を片側だけ肌に貼ります。



テープの中央部分にチューブを当てます。



チューブを包むように折り返します。



残ったテープの端の三角部分を重ねると自然なオメガ(Ω)留めになります。

⚠ 注意

三角部分は深く重ねる
三角部分の重ねが浅いと、オメガ留めになりづらい。



左右に残った剥離紙をはがし、端まで肌に密着させます。



完成 ✨

はがし方



三角部分からはがします。



テープと肌が平行になるように引っぱりながらゆっくりとはがします。肌の負担が少なくなり、やさしくはがせます。

⚠ 注意

垂直にはがさない
一番肌を傷つけやすいはがし方と言われています。



クリアホルドライナーの
貼り方動画はこちら



テープが医療にできること、もっと。

skinix®
www.skinix.jp